

SuperNova 20

Was ist neu?

Stand: 03/2021



SuperNova 20.01

SuperNova 20.01 erschien am 27.01.2021 als Nachfolger von SuperNova 19.05. Die wichtigste Neuerung ist die Eingliederung der Leseapp „EasyReader für Windows“ in SuperNova. Darüber hinaus wurden einige kleinere Funktionen neu implementiert bzw. verbessert, unter anderem Hilfen für Tastenkombinationen und die Darstellung vergrößerter Mauszeiger.

Neue Funktionen

EasyReader für Windows

Dolphins barrierefreie Leseapp „EasyReader für Windows“ ist jetzt Bestandteil von SuperNova. Der EasyReader wurde speziell für Blinde und Sehbehinderte, sowie Menschen mit einer Lese-Rechtschreib-Schwäche entwickelt.

Der EasyReader kann auf zwei Wegen aufgerufen werden. Zum einen über die Registerkarte „Bibliothek. Hier die Schaltfläche „Bücher“ aktivieren und eine der drei angebotenen Optionen auswählen:

- **Meine Bücher:** Lädt ein bestimmtes Buch herunter bzw. öffnet es im EasyReader. Der EasyReader beinhaltet den Zugang zu 31 barrierefreien Bibliotheken und Zeitungsservices.
- **Meine Zeitung:** Öffnet eine abonnierte Zeitung im EasyReader bzw. ermöglicht es eine Zeitung zu abonnieren.
- **Öffne Dateien im Leser:** Öffnet beliebige Word-, Text-, EPUB- oder DAISY-Dateien im Easy Reader.

Zum anderen kann der EasyReader auch direkt über die Verknüpfung im Startmenü bzw. auf dem Desktop geöffnet werden.

HINWEIS: Für die Nutzung des EasyReaders ist ein Dolphin oder Google Account notwendig. Weiterhin werden Zugangsdaten für die verschiedenen Bibliotheks- und Zeitungsservices benötigt.

Der EasyReader für Windows ersetzt Reader-Funktion, die in älteren Versionen von SuperNova auf der Registerkarte „Bibliothek“ zu Verfügung stand. Zuvor erworbene oder Heruntergeladenen Dateien müssen eventuell erneut mit dem EasyReader heruntergeladen werden.

Hilfe für Tastenkombinationen

SuperNova 20 bietet jetzt eine Hilfe für Tastenkombinationen („Hotkey Helper“), die es ermöglicht, gezielt nach bestimmten Tastenkombinationen zu suchen oder sich alle Tastenkombinationen für eine Anwendung anzeigen zu lassen.

Die Hilfe lässt sich mit der Tastenkombination „Linke STRG + CAPSLOCK + F2“ aufrufen. Sobald die Hilfe geöffnet ist, können Schlagworte in das Suchfeld eingegeben werden, um eine Liste der relevanten Tastenkombinationen zu erhalten. Das Schlagwort „Speech“ etwa gibt alle Tastenkombinationen aus, die mit Sprache zutun haben, „Read“ hingegen gibt eine Liste aller Tastenkombinationen zum Thema „Lesen“ bzw. „Vorlesen“ aus.

Ebenso können alle Tastenkombinationen für eine bestimmte Anwendung angezeigt werden, indem das Caret (^) gefolgt vom Namen der Anwendung in das Suchfeld eingegeben wird. Die Eingabe „^Excel“ z.B. gibt eine Liste aller Tastenkombinationen für die Nutzung von SuperNova zusammen mit Microsoft Excel aus.

HINWEIS: Die Hilfe für Tastenkombinationen ist aktuell nur auf Englisch verfügbar.

Neue Tastenkombinationen für „Connect & View“

In SuperNova 20 gibt es eine Reihe von Verbesserungen für die „Connect & View“-Funktion, welche die Nutzung und Anpassung erleichtern. Zum einen enthält die Symbolleiste im „Connect & View“-Fenster jetzt eine Schaltfläche, die es erlaubt, zwischen den Darstellungsmodi „Vollbild“ und „geteilter Bildschirm“ zu wechseln, ohne dass das Fenster verlassen werden muss. Außerdem ist die Darstellung des Mauszeigers jetzt deutlich schärfer und der Mauszeiger ändert seine Größe entsprechend der gewählten Vergrößerungsstufe.

Darüber hinaus gibt es eine Reihe neuer Tastenkombinationen, welche die Steuerung der „Connect & View“-Funktion deutlich vereinfachen:

- Linke STRG + Num 1: Ausrichtung des Kamerabildes drehen
- Linke STRG + Num 3: Autofokus an-/ausschalten
- Linke STRG + Num 7: Darstellungsmodus wechseln
- Linke STRG + Kleiner als: Symbolleiste reduzieren/erweitern

Pausenfunktion für „Lesen ab hier“

„Lesen ab Hier“ erhält mit SuperNova 20 eine neue Pausenfunktion. Der Anwender kann nun nicht nur das Vorlesen über einen Tastendruck oder Mausklick starten und stoppen, sondern mit der Leertaste auch pausieren. Wenn „Lesen ab Hier“ pausiert ist, bleibt die Hervorhebung auf dem letzten gelesenen Wort sichtbar, sodass der Anwender leicht erkennen kann, bis wohin vorgelesen wurde und ab welchem Punkt es fortgesetzt wird. Außerdem kann der Anwender mit der Maus den Bildschirm erkunden, wenn das „Lesen ab Hier“ pausiert ist, ohne den Punkt zu verlieren, ab dem das Vorlesen fortgesetzt wird.

Verbesserte Darstellung vergrößerter Mauszeiger.

Die Darstellung vergrößerter Mauszeiger ist mit SuperNova 20 scharf und klar. Die Kanten des Mauszeigers bleiben auf alle Vergrößerungsstufe glatt, unabhängig davon, ob der Anwender ein Mauszeiger von SuperNova oder aus dem „Center für erleichterte Bedienung“ von Windows ausgewählt hat.

Außerdem respektiert SuperNova 20 die Einstellungen für den Mauszeiger, die über das „Center für erleichterte Bedienung“ festgelegt worden sind, inklusive Typ, Farbe und Größe.

Weitere Verbesserungen und Fehlerkorrekturen

- **Vergrößerung und Sprache für Selbstbedienungsterminals:** Mit SuperNova 20 ist es jetzt möglich, Selbstbedienungsterminals für Blinde und Sehbehinderte barrierefrei verfügbar zu machen.
- **Firefox, Chrome & Edge:** Probleme bei Sprachausgabe in Eingabefeldern und sporadische Abstürze bei Änderungen in „Live Regionen“ behoben.
- **Multi-Monitoring:** SuperNova 20 ist jetzt in der Lage auch nicht rechteckige Bildschirme korrekt zu erkennen.
- **Microsoft Office:** Probleme mit verschiedenen Sprachfunktionen in Word und Outlook behoben.
- **Lesen ab hier:** Das gelesene Wort wird jetzt auch dann richtig hervorgehoben, wenn die Hervorhebung ansonsten ausgeschaltet ist.
- **Windows Explorer:** Probleme mit der Ansage von Spalten und Kategorien sowie der Umbenennung von Dateien behoben.
- **Zoom:** Sprachausgabe und Fokuserkennung wurden deutlich verbessert.

Wichtiger Hinweis für Nutzer von Windows 7/Windows Server 2008 R2

Ab Version 20 unterstützt SuperNova Windows 7 bzw. Windows Server 2008 R2 offiziell nicht mehr. Das bedeutet nicht, dass SuperNova 20 auf diesen Betriebssystemen nicht mehr läuft, jedoch werden neue SuperNova-Versionen ab Version 20 nicht mehr auf Windows 7/Server 2008 R2 getestet. Außerdem gibt es keinen Support mehr für diese Konstellationen und Fehler werden nicht mehr behoben.

Quellen

Releasenotes SuperNova 20.01: [YourDolphin.com: SuperNova 20.01](#)