

Victor Reader Stream

Bedienungsanleitung



Victor Reader Stream

Lieferumfang

1. Vitor Reader Stream
2. Netzteil
3. USB-Leitung lang
4. USB-Leitung kurz
5. Ohrhörer
6. Softschale
7. SD-Karte

Inbetriebnahme

1. Vor der ersten Inbetriebnahme schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an. Dazu stecken Sie das Netzteil in den Netzanschluss, das dickere Ende der USB-Leitung in die Oberseite des Netzteils und das dünnere Ende der USB-Leitung in die Buchse unterhalb des Gerät.

Bitte beachten: Der Victor Reader kann während des Ladevorgangs benutzt werden.

2. Schalten Sie den Victor Reader ein indem Sie die Taste 'Ein/Ausschalten' gedrückt halten. Sie hören einen Piepton und einen Begrüßungstext.

Gehe zu

Ein/Aus-Taste

Lautfeil

Leisepfeil

Navigation

1 lang	Bedienungsanleitung
2,4,6,8	Navigation
3	Löschen
5	Wo bin ich?
7	Menü
*	Abbrechen
0	Hilfe
#	Bestätigen

Moduswechsel
Onlinefunktion

SD-Karteschacht

Ohrhörerbuchse

Lesezeichen

Mikrofonbuchse

Aufnahmetaste



Schlaffunktion

Rückwärts

USB-Buchse

Start/
Stopp

Vorwärts

Tastaturhilfe

Die Tastaturhilfe wird durch Drücken der Taste „0“ – bis Sie die Ansage hören – eingeschaltet oder ausgeschaltet.

Hinweis

Akku: Einen passenden Ersatzakku können Sie über unseren Service beziehen.

Funktionen

- **Lesezeichen einfügen:**
Durch zweimaliges Drücken der Taste ‚Lesezeichen‘ kann ein Lesezeichen eingefügt werden.
- **Lesezeichen anspringen:**
Durch einmaliges Drücken der Taste ‚Lesezeichen‘ wird das gesetzte Lesezeichen angesprungen.
- **Lesezeichen löschen:**
Durch fünfmaliges Drücken der Taste ‚Lesezeichen‘ wird das gesetzte Lesezeichen entfernt.