

SCHNELLANLEITUNG

Victor Reader Stream & Trek

Version : 1.0.0
Stand : 10.2020



Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Hinweise	3
Copyright.....	3
Inbetriebnahme	4
Kleine Erkundung Ihres Streams	5
Vorderseite.....	5
Oberkante	6
Rechte Seite	6
Nächste Schritte/Hilfe bekommen	7

Diese Schnelleinleitung gilt für das Produkt Victor Reader Stream & Trek.

Hersteller: HumanWare Group
Russell Smith House
2 Bullmatt Business Centre
Northampton Road
Rushden, Northamptonshire NN10 6AR
United Kingdom
Tel: +44 1933 415 800
Fax: +44 1933 411 209
Email: eu.sales@humanware.com

Alle technischen Daten, Informationen sowie Eigenschaften des in diesem Werk beschriebenen Produkts wurden nach bestem Wissen zusammengestellt und entsprechen dem Stand bei Veröffentlichung.

Änderungen und Verbesserungen des Produkts aufgrund technischer Neuentwicklung sind möglich.

Diese Anleitung oder das Produkt können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Es werden keine Schäden übernommen, die direkt oder indirekt durch Fehler in der Anleitung oder widersprüchliche Aussagen der Anleitung verursacht wurden.

Allgemeine Hinweise

Copyright

© Copyright 2020 - Urheberrechtshinweis

Alle Inhalte dieser Gebrauchsanweisung, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken, sind urheberrechtlich geschützt. Das Urheberrecht liegt, soweit nicht ausdrücklich anders gekennzeichnet, bei der HumanWare Group oder der Firma F.H. Papenmeier GmbH & Co. KG. Bitte fragen Sie uns, falls Sie die Inhalte dieses Werks verwenden möchten.

Inbetriebnahme

Herzlich willkommen beim Victor Reader Stream! Das vollständige Benutzerhandbuch befindet sich im Gerät und kann jederzeit durch Gedrückt halten der Taste 1 geöffnet werden.



Zur Inbetriebnahme:

1. Halten Sie den Player so, dass die abgerundete Seite zu Ihnen zeigt. Die Einschalttaste befindet sich oben auf der linken Seite des Players.
2. Schalten Sie den Player ein, indem Sie die Einschalttaste gedrückt halten. Sie hören dann einen Piepton und eine Willkommensnachricht. Wenn der Player sich nicht einschaltet, muss eventuell der Akku aufgeladen werden.
3. Zum Laden des Akkus stecken Sie den mitgelieferten Netzstecker in eine Steckdose. Schließen Sie das lange, mitgelieferte USB-Kabel an diesen Netzstecker an. Stecken Sie den Mikro-USB-Stecker in die Buchse in der Mitte der Unterkante vom Victor Stream. Der Stream kann während des Ladevorgangs eingeschaltet sein.
4. Neben der Einschalttaste befinden sich auf der linken Seite zwei Pfeiltasten (hoch und runter) für die Lautstärkeregelung. Sie können diese Pfeiltasten auch zur Einstellung von Abspielgeschwindigkeit, klang und Tonhöhe nutzen. Um diese Funktionen auszuwählen, drücken Sie die Einschalttaste, wenn der Stream eingeschaltet ist. Um den Stream abzuschalten, halten Sie die Einschalttaste gedrückt. Darunter befindet sich eine grüne Leuchtdiode. Sie leuchtet, wenn der Stream eingeschaltet ist und blinkt, wenn er ausgeschaltet ist und der Akku geladen wird.



Kleine Erkundung Ihres Streams

Wenn Sie den Player einschalten, ohne dass eine SD-Karte aktiviert ist, wird automatisch die Tastaturhilfe aktiviert. Hier wird Ihnen die Funktion jeder Taste, die Sie auf der Vorderseite drücken, erläutert.

Vorderseite

An der unteren abgerundeten Seite des Players befinden sich 3 Tasten. Die rechteckige Taste in der Mitte ist die Play-/Stopptaste. Links davon ist die Rückspultaste und rechts die Vorspultaste.

Über Play/Stopp befindet sich eine ovale Taste zum Ansagen von Datum und Uhrzeit und zur Einstellung der automatischen Einschlaffunktion "Sleep-Timer". Drücken Sie die Taste einmal, um Datum- und Uhrzeit ansagen zu lassen. Drücken Sie die ovale Taste mehrmals, werden verschiedene Zeitintervalle aktiviert, nach denen sich der Player abschaltet.



Über der Einschlaf-taste befindet sich eine erhabene horizontale Linie und darüber eine Nummerntastatur, wie beim Telefon.

- Taste 1: Durch mehrmaliges Drücken wählen Sie ein Bücherregal auf Ihrer Speicherkarte aus. Durch Gedrückt halten öffnen und schließen Sie das integrierte Benutzerhandbuch.
- Mit den Tasten 2/8 bewegen Sie sich in einer rundum laufenden Liste von Buchnavigationsebenen auf und ab.
- Mit den Tasten 4/6 bewegen Sie sich innerhalb der ausgewählten Navigationsebene vor und zurück.
- Taste 3 ist die Löschtaste (siehe Handbuch).
- Taste 5 sagt die aktuelle Lese-position an.
- Taste 7 öffnet das Konfigurationsmenü des Players (siehe Handbuch).
- Taste 9 springt zwischen synthetischer Sprache und dem Aufnahmeabspielmodus (siehe Handbuch).
- Wenn Sie Taste 0 drücken, bekommen Sie Informationen zu Buch, Player und Akkustand. Durch Gedrückt halten der Taste 0 schalten Sie die Tastaturhilfe ein und aus, wenn eine Speicherkarte aktiviert ist.



- Durch Drücken der Sterntaste können Sie Vorgänge unterbrechen oder abbrechen. Durch Gedrückt halten der Sterntaste sperren Sie die Tastatur. Zum Entsperren drücken Sie nacheinander die Tasten 1, 2 und 3.
- Mit der Nummerntaste (Raute) bestätigen Sie Zahleneingaben oder bestimmte Vorgänge. Wird die "Raute"-Taste gedrückt und gehalten, erhalten Sie Informationen zum Akkustatus oder zum Ladezustand der Batterie.

Über Taste 1 liegt die Gehe-Zu-Seite-Taste, mit der Sie auch zu Überschriften und Büchern springen können. Über der Gehe-zu-Taste befindet sich ein Löchlein, das eingebaute Monomikrofon.

Über Taste 2 liegt die runde Onlinetaste zum Ein/Ausschalten des Flugmodus (WLAN und zum Wechseln zwischen dem Standard- und dem Online-Bücherschrank des Players). Auf der 2-Uhr-Position der Onlinetaste ist eine Leuchtdiode angebracht. Sie leuchtet gelb, wenn WLAN eingeschaltet ist. Während eines Verbindungsaufbaus blinkt sie. Hat der Player keine Netzwerkverbindung, ist sie abgeschaltet.

Über Taste 3 liegt die Lesezeichentaste. Durch mehrmaliges Drücken bewegen Sie sich im Lesezeichenmenü und können Lesezeichen einfügen, anzeigen lassen, anspringen und löschen. Darüber hinaus können Sie zwischen Groß- und Kleinbuchstaben sowie Zahlen umschalten, wenn Sie ein Passwort eingeben müssen.



Oberkante

In der Mitte der Oberkante befindet sich der Schlitz für die SD-Karte. Aus dem Handbuch erfahren Sie, wie Sie auf der SD-Karte Bücher und Dateien speichern können. Darunter ist der Lautsprecher.

Rechts neben dem Kartenschlitz befindet sich die Kopfhörerbuchse, mit der man auch externe Lautsprecherboxen verbinden kann.



Rechte Seite

Auf der rechten Seite, nahe der oberen Ecke, befindet sich der Anschluss für ein Stereomikrofon (auch als Line-in-Anschluss nutzbar). Direkt darunter befindet sich die Aufnahme-Taste mit einem roten Kreis und einem erhabenen Punkt in der Mitte.

Im Handbuch finden Sie Informationen zum Aufnahmevorgang.



Nächste Schritte/Hilfe bekommen

Sie können Ihr erstes Daisybuch durch gedrückt halten der Taste 1 abspielen. Dadurch wird das integrierte Benutzerhandbuch, ein strukturiertes Daisybuch, abgespielt. Hier finden Sie alle Informationen zur Nutzung des Players und zum Speichern Ihrer Bücher und Dateien auf einer SD-Karte. Drücken und halten Sie die Taste 1 erneut, so verlassen Sie das integrierte Handbuch.

Durch Drücken und Halten der Taste 0 wird die Tastaturhilfe aktiviert. Drücken oder drücken Sie eine beliebige Taste, so wird Ihnen nun deren Funktion erläutert. Drücken und halten Sie Taste 0 erneut, um die Tastaturhilfe auszuschalten.

Sollten Sie weitere Hilfe benötigen, die Sie nicht mit Hilfe des auf dem Gerät befindlichen Handbuchs lösen können, stehen Ihnen unsere Kollegen in Schwerte unter Tel.: +49 2304 946 143 gerne jederzeit zur Verfügung.