

VISULEX Maki

Kurzanleitung


Taste 4:
Übersichtsbild mit Fadenkreuz /
zurück zur Vergrößerung
Nach 3 Sek.: Manueller Fokus einstellen

Taste 5:
LED Ein / Aus
Nach 3 Sek.: LED Dimmer einstellen

Taste 3:
Kamerabild drehen
Nach 3 Sek.: Spiegelbild erzeugen

Taste 2:
Hilfslinien Ein / Aus
Nach 3 Sek.: Einstellungen Linie /
Vorhang

Taste 1:
Echtfarben / Graustufen / Falschfarben /
Falschfarbeninvers
Nach 3 Sek.: Farbauswahl oder Farb-
sättigung einstellen

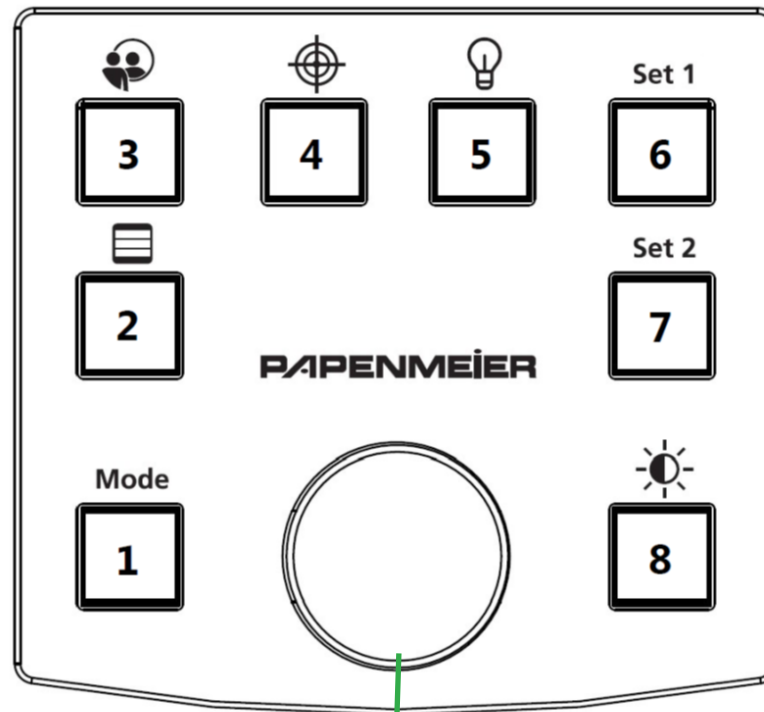

Drehrad:
Durch Drehen Zoomstufe wählen
Bei Einstellungen: Auswählen durch Drehen
und Bestätigen der Auswahl oder Werte
durch Drücken

Taste 6:
Benutzereinstellung 1 aufrufen
Nach 3 Sek.: aktuelle Einstellungen als Benutzer-
einstellung 1 speichern

Taste 7:
Benutzereinstellung 2 aufrufen
Nach 3 Sek.: aktuelle Einstellungen als Benutzer-
einstellung 2 speichern

Taste 8:
Mit optionalem Umschalter: Umschaltung PC- /
Kamerabild
Bei Mode Echtfarbe nach 3 Sek.: Bildhelligkeit
einstellen
Bei Mode Falschfarben nach 3 Sek.: Kontrast-
schwelle einstellen

Wichtiger Hinweis:

Diese Kurzanleitung darf nur zusammen mit dem Benutzerhandbuch verwendet werden.