

# Victor Reader Stratus 12

## Bedienungsanleitung



# Victor Reader Stratus 12

## Lieferumfang

1. Daisyplayer
2. Ladegerät
3. Hörbuch auf CD mit Bedienungsanleitung

## Inbetriebnahme

1. Vor der ersten Inbetriebnahme schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an. Dazu stecken Sie das Ende des mitgelieferten Netzteils in den Netzanschluss, der sich auf der Rückseite rechts befindet. Während des Ladevorgangs blinkt die Einschalttaste.

*Bitte beachten: Der Victor Reader kann während des Ladevorgangs benutzt werden.*

2. Schalten Sie den Victor Reader ein indem Sie die Taste 'Ein/Ausschalten' gedrückt halten. Sie hören einen Piepton und einen Begrüßungstext.

3. Schieben Sie die beiliegende CD vorne in den Schlitz des Laufwerks. Die CD enthält eine aufgesprochene Bedienungsanleitung im Daisy-Format. Warten Sie bis der Titel angesagt wird. Drücken Sie dann die Taste ‚Start/Stopp‘ und die Bedienungsanleitung wird vorgelesen.

## Navigation

1	Bücherregal
2,4,6,8	Navigation
3	Nicht belegt
5	Wo bin ich?
7	Menü
*	Abbrechen
0	Hilfe/Tastenbeschreibung
#	Bestätigen

Bücherregaltaste


Lesezeichen

CD-Auswurf

CD-Laufwerk





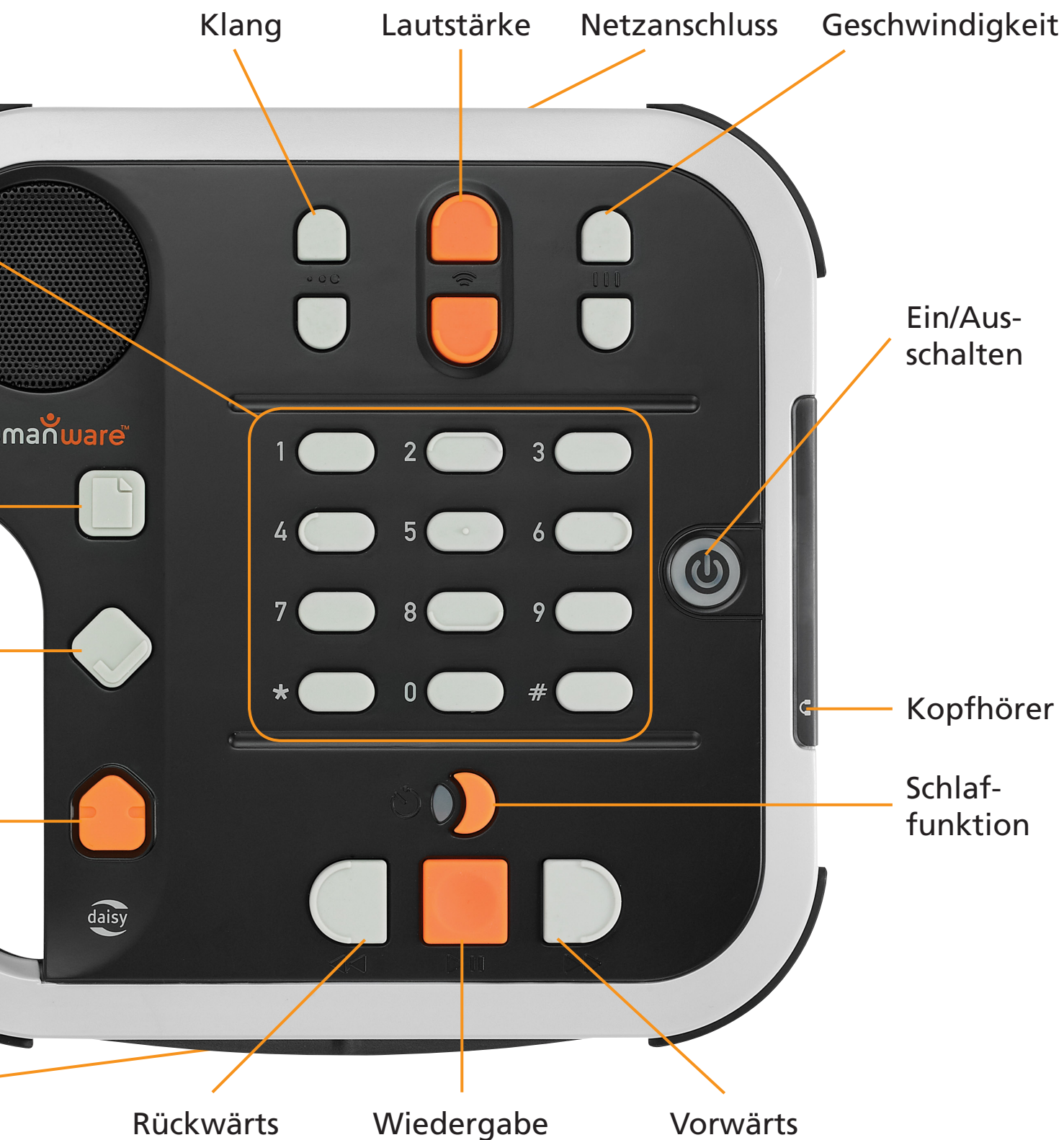

## Tastaturhilfe

Die Tastaturhilfe ist automatisch eingeschaltet, wenn keine CD eingelegt ist. Drücken Sie eine Taste und der Victor Reader sagt Ihnen die zugehörige Funktion an.

## Funktionen

- **Lesezeichen einfügen:**  
Durch zweimaliges Drücken der Taste ‚Lesezeichen‘ kann ein Lesezeichen eingefügt werden.
- **Lesezeichen anspringen:**  
Durch einmaliges Drücken der Taste ‚Lesezeichen‘ wird das gesetzte Lesezeichen angesprungen.
- **Lesezeichen löschen:**  
Durch fünfmaliges Drücken der Taste ‚Lesezeichen‘ wird das gesetzte Lesezeichen entfernt.

## Hinweise

1. Akku:  
Einen passenden Ersatzakku können Sie über unseren Service beziehen.
2. Reset:  
Durch ca. 10 Sekunden langes Drücken der Taste ‚Ein/Ausschalten‘ setzen Sie das Gerät in den ursprünglichen Zustand zurück.
3. Das Gerät lädt ca. alle drei bis vier Minuten neue Daten von der CD. Die hierdurch entstehenden Geräusche beeinträchtigen nicht die Funktion.
4. CD wird nicht ausgeworfen:
  - Drücken und halten Sie die Taste ‚CD-Auswurf‘.
  - Starten Sie nach ca. 10 Sekunden das Gerät neu bei weiterhin gedrückter Taste ‚CD-Auswurf‘.
  - Eventuell handelt es sich um eine zu sehr beanspruchte CD Ihrer Hörbücherei.