

VISULEX OptiView – Clearnote Funktionen

Hilfeliste der Tastenfunktionen	Strg+H
Bild vergrößern / verkleinern (Zoom)	→ - ←
Autofokus der Kamera an / aus	Strg+A
Bildschärfe minus /Bildschärfe plus	Strg + / -
Modusumschaltung Foto,Positiv,Negativ	M
Monochrom-(Semi)farben an / aus	Strg+M
Monochrom-(Semi) Farbkombinationen wechseln	Shift+M
Split-Modus umschalten (nur mit Vergrößerungssoftware)	W
Vollbildmodus ein / aus	V
Videofenster ein / ausblenden	Strg+V
Fenster in die Ecken des Desktops bewegen	B
ClearNote Videofenster der originalen Videoauflösung anpassen	0
Bild um jeweils 180° drehen	Strg+D
Bild spiegeln	Shift+D
Helligkeit erhöhen / verringern	H Shift+H
Kontrast erhöhen / verringern	K Shift+K
Farbsättigung erhöhen / verringern	F Shift+F
Tönung = Farbton erhöhen / verringern	T Shift+T

Helligkeit, Kontrast, Farbsättigung und Farbton auf die Standardwerte zurücksetzen	Strg+R
Standbild / Livebild	S
Aktuelles Bild speichern - Dateiauswahldialog	Strg+S
Bilddatei öffnen	Strg+O
Aktuelles Bild speichern (Es können maximal 10 Bilder gespeichert werden.)	Shift+1 ... 0
Aktuelles Bild laden (Es können die 10 Bilder geladen werden.)	1 ... 0
Horizontale Linie ein / aus	L
Horizontale Linie nach oben/unten bewegen	↑ - ↓
Videofenster proportional vergrößern / verkleinern	Shift +/-
Videofenster horizontal vergrößern / verkleinern	Strg+ ← - →
Videofenster vertikal vergrößern / verkleinern	Strg+ ↑ - ↓
Fenster nach links / rechts verschieben	Shift+ ← - →
Fenster nach oben / unten verschieben	Shift+ ↑ - ↓
Interlacing an / aus	I
Interlacingmodus wechseln	Strg +I
Toolbox ein / ausblenden	Strg+T
Interne / externe Kamera umschalten	Strg+K
LED Beleuchtung an / aus	Strg+B