

VISULEX Eagle Pro - Referenz Eagle Maus



Bildwiedergabe

Drücken Sie die **linke Maustaste** der Eagle-Maus **zweimal** kurz hintereinander, um den Modus zu wechseln:

Nur Kamera, nur Computer, Mischung

Ändern des Bildausschnitts im Bildschirmmenü.



Farbeinstellung

Die Farbendarstellung wird mit der Eagle-Maus aktiviert: Drücken Sie **zweimal die rechte Maustaste** kurz hintereinander, um den Farbmodus zu wählen:

Echtfarben, Graustufen, Falschfarben, Falschfarben invers

Vergrößerung




Mausrad aufwärts drehen, wenn Sie die **Vergrößerung erhöhen** wollen.
Mausrad abwärts drehen, wenn Sie die **Vergrößerung verringern** wollen.



Autofokus

Drücken Sie das **Rad** der Maus **zweimal kurz** hintereinander, um den AutoFokus ein- oder auszuschalten.

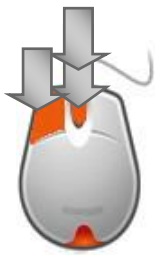

Helligkeitsautomatik

Drücken und halten Sie die **linke Maustaste**. Führen Sie einen **Doppelklick** mit dem **Mausrad** aus. Damit wird die Helligkeitsautomatik ein- oder ausgeschaltet.



Beleuchtung

Drücken Sie die **rechte Maustaste lang**, um die Beleuchtung ein- oder auszuschalten.




Helligkeit der Beleuchtung

Drücken und halten Sie die **linke und die rechte Taste** der Eagle-Maus. Drehen Sie am Mausrad, um die Helligkeit zu verringern oder zu erhöhen.



Linien und Vorhang

Drücken und halten Sie die **linke Taste** der Eagle-Maus. Führen Sie einen **Doppelklick auf der rechten Maustaste** aus. Bei mehrmaliger Ausführung wird zwischen "Linien", "Vorhang" und "aus" gewechselt.

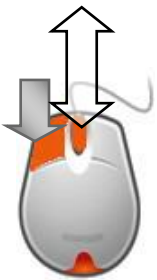

Helligkeit

Drücken und halten Sie die **linke Taste** der Eagle-Maus. Bewegen Sie nun das **Rad** der Eagle-Maus nach oben oder unten, um die Helligkeit zu erhöhen oder zu verringern.
(Helligkeitsautomatik zuvor abschalten)



Kontrast

Drücken und halten Sie die **rechte Taste** der Eagle-Maus. Bewegen Sie nun das **Rad** der Eagle-Maus nach oben oder unten, um den Kontrast zu verändern.



Bildschirmmenü (OSD) aktivieren

Drücken Sie die **linke Maustaste lang**, um das Bildschirmmenü zu aktivieren. Mit der rechten Maustaste wird das aktivierte Menü wieder verlassen.

Standbild/Bewegung



Rad lang drücken zum Ändern der Bewegungserkennung:

Bewegungserkennung an - keine Bewegung, Bild wird eingefroren.

Bewegungserkennung aus: Bild wird nie eingefroren, keine Erkennung einer Bewegung

Standbild: Bild wird sofort eingefroren

Werkseinstellungen



Alle drei Tasten drücken und für 3 Sek. halten. Nach dem Signal erscheint die Anzeige nun in der vorgegebenen Standard Werkseinstellung. Das Drücken der Tasten für mehr als 5 Sek. führt nach einem zweiten Signalton zusätzlich einen Neustart des Bildmischers durch.