

Plextalk PTN-1 Pro Benutzerhandbuch

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	2
Teil 1: Lernen Sie den Plextalk kennen	4
Die Verpackung öffnen	4
Orientierung auf dem Player	4
Verbinden mit dem Stromnetz.....	4
Das Gerät einschalten	4
Eine CD einlegen	5
Eine CD abspielen	5
Einstellen der Lautstärke	5
Eine CD auswerfen	5
Gerät ausschalten.....	5
Teil 2: Benutzerhandbuch.....	6
1: Einleitung	6
1.1: Zu Ihrer Sicherheit.....	6
1.2: Pflege des Akkus.....	8
1.3: Eigenschaften des Plextalk	9
1.4: Hauptmerkmale	9
1.5: Inhalt der Verpackung	9
1.6: Über die Benutzerhandbuch-CD	9
1.7: Bewahren Sie die Verpackung auf	10
1.8: Orientierung auf dem Player.....	10
1.9: Verbinden mit dem Stromnetz	10
1.10: Das Gerät ein- oder ausschalten.....	10
1.11: Ausschalten erzwingen.....	11
1.12: Einlegen oder Auswerfen der Benutzerhandbuch Daisy-CD	11
1.13: Tastenbeschreibungsfunktion.....	11
2: Lage der Tasten.....	11
2.1: Geräteoberseite.....	11
2.2: Gerätevorderseite.....	12
2.3: Gerätehinterseite	13
2.4: Die linke Geräteseite	13
3: Grundfunktionen	13
3.1: Abspielen und Stoppen	13
3.2: Zurück- und Vorspulen	13
3.3: Die Lautstärke einstellen	13
3.4: Die Sprachführungslautstärke einstellen	14
3.5: Den Klang einstellen.....	14
3.6: Die Abspielgeschwindigkeit einstellen	14
4: Die aktuelle Position im Daisybuch hören	15
4.1: Verfügbare Informationen.....	15
4.1.1: Verfügbare Informationen im Abschnitt "Aktuelle Position"	15
4.1.2: Verfügbare Informationen im Abschnitt "Akkuinformationen"	15
4.1.3: Verfügbare Informationen im Abschnitt "Systemeigenschaften"	15
4.1.4: Verfügbare Informationen im Abschnitt "Seiteninformationen"	15
4.1.5: Verfügbare Informationen im Abschnitt "Überschriftsinformationen"	15
5: In einem Daisybuch navigieren	16
5.1: Einen Titel auswählen	16
5.2: Ebenen- bzw. Abschnittsweise navigieren	16
5.3: Seitenweise navigieren.....	17

5.4: Gruppenweise navigieren.....	18
5.5: Navigieren mit Hilfe von Zeitintervallen	18
5.6: Zum Anfang oder Ende eines Titels springen.....	19
5.7: Phrasenweise navigieren	19
5.8: Lesezeichen	19
5.8.1: Lesezeicheninformationen hören	19
5.8.2: Lesezeichen setzen.....	20
5.8.3: Zu Lesezeichen springen	20
5.8.4: Lesezeichen löschen.....	21
5.8.5: Das Wo-War-Ich-Lesezeichen.....	22
6: Navigieren auf Musik- und MP3-CDs.....	22
6.1: Die aktuelle Position auf einer Musik-CD (CD-DA) hören.....	23
6.2: Verfügbare Informationen.....	23
6.2.1: Verfügbare Informationen im Abschnitt "Trackinformationen"	23
6.2.2: Verfügbare Informationen im Abschnitt "CD-Informationen".....	23
6.2.3: Verfügbare Informationen im Abschnitt "Akkuinformationen"	23
6.2.4: Verfügbare Informationen im Abschnitt "Systemeigenschaften".....	23
6.2.5: Verfügbare Informationen im Abschnitt "Aktuelle Position"	24
6.3: Trackweise navigieren.....	24
6.4: Zum Anfang oder Ende springen.....	25
6.5: Die aktuelle Position auf einer MP3-CD hören	25
6.6: Verfügbare Informationen.....	25
6.6.1: Verfügbare Informationen im Abschnitt "Trackinformationen"	25
6.6.2: Verfügbare Informationen im Abschnitt "Akkuinformationen"	25
6.6.3: Verfügbare Informationen im Abschnitt "Systemeigenschaften".....	26
6.6.4: Verfügbare Informationen im Abschnitt "Aktuelle Position"	26
6.7: Navigieren auf einer MP3-CD.....	26
6.8: Albenweise navigieren.....	26
6.9: Trackweise navigieren.....	27
6.10: Zum Anfang oder Ende springen.....	28
7: Die Funktion Schlafmodus	28
7.1: Einstellen des Schlafmodus	28
7.2: Den Schlafmodus ausschalten	28
7.3: Die verbleibende Zeit im Schlafmodus hören	28
8: Playerinformationen	28
9: Fehlerbehebung.....	28
10: Technische Spezifikationen	29

Teil 1: Lernen Sie den Plextalk kennen

Vielen Dank, dass Sie den Plextalk gekauft haben! Wir hoffen, dass Sie das Hören von digitalen Büchern mit diesem einmaligen Produkt genießen. In diesem Abschnitt erfahren Sie alles, was Sie brauchen, um mit der Benutzung des Plextalks zu beginnen, vom Öffnen der Verpackung bis zum Abspielen digitaler Hörbücher.

Die Verpackung öffnen

Die Verpackung, welche Sie gerade geöffnet haben, enthält folgendes:

- Einen Plextalk
- Einen Netzadapter, liegt getrennt vom Plextalk unter einer Pappe
- Eine Plastikhülle, die Dokumentation und die Benutzerhandbuch-CD, welche Sie gerade hören, enthält.

Orientierung auf dem Player

Stellen Sie den Plextalk so auf eine Oberfläche, dass die Tasten nach oben zeigen. Drehen Sie das Gerät so, dass der große eingebaute Lautsprecher sich rechts oben befindet und der CD-Einschubschlitz zu ihnen zeigt.

Verbinden mit dem Stromnetz

Wenn Sie den Plextalk zum ersten mal benutzen, sollten Sie ihn mit einer Steckdose verbinden. Der Akku könnte sich während des Versands entladen haben, obwohl er vor dem Verlassen der Fabrik geladen wurde.

Das Netz- und Ladegerät des Plextalk besitzt ein Kabel, welches in eine Steckdose gesteckt wird, sowie ein weiteres Kabel, das mit dem sich am Kabelende befindenden runden Stecker mit dem Plextalk verbunden wird. Stecken Sie den kleinen runden Stecker in die Buchse an der Rückseite des Plextalk. Stecken Sie dann den Netzstecker, an dem sich zwei Stifte befinden, in eine Steckdose.

Das Gerät einschalten

Der runde Ein- Ausschalter ist etwas in's Gerät eingelassen und befindet sich auf der Oberseite rechts in der Mitte. Um das Gerät einzuschalten, drücken Sie den Knopf und halten Sie ihn für etwa eine Sekunde lang gedrückt, lassen Sie ihn danach bitte los. Es sind dann Töne zu hören, an denen Sie erkennen können, dass der Player jetzt aktiv ist. Zugleich leuchtet eine grüne LED-Anzeige auf.

Eine CD einlegen

Schieben Sie eine CD in den Schlitz an der Gerätevorderseite. Bitte berühren Sie beim Einschieben einer CD nicht deren unbeschriftete Seite. Die meisten Abspielfehler werden nämlich durch Staub und Fingerabdrücke verursacht. Halten Sie die CD mit vier Fingern am Rand oder stecken Sie einen Zeigefinger in das Loch, welches sich in der CD-Mitte befindet und halten Sie die CD zusätzlich mit den Daumen am Rand.

Eine CD abspielen

Wenn die CD korrekt eingelesen werden konnte, sagt die Sprachführung den CD-Typ an. Zusätzlich wird der Titel gesprochen, falls es sich um eine Daisy-CD handelt. Falls die CD nicht abspielbar ist oder verkehrt herum eingelegt wurde, sagt die Sprachführung: "CD ist ungültig oder beschädigt". Drücken Sie in diesem Fall die sich unter dem Ein- Ausschalter befindende CD-Ausgabetaste, um die CD auszuwerfen.

Einstellen der Lautstärke

Die Tasten Lautstärke nach oben bzw. nach unten liegen in der oberen Mitte der Geräteoberseite. Sie haben die Form eines Halbmondes. Drücken Sie die obere Taste, um die Lautstärke zu erhöhen und die untere, um sie zu verringern.

Eine CD auswerfen

Die CD-Ausgabetaste befindet sich in der rechten unteren Ecke der Geräteoberseite. Sie hat die Form eines Quadrats. Um eine CD auszuwerfen, drücken Sie einfach die CD-Ausgabetaste. Die Sprachführung sagt "CD-Ausgabe", und einige Sekunden später wird die CD automatisch durch den Einschub- und Ausgabeschlitz ausgegeben.

Gerät ausschalten

Um das Gerät auszuschalten, drücken Sie den Ein- Ausknopf und halten Sie ihn für etwa eine Sekunde lang gedrückt. Die Ausschaltöne sind zu hören und die grüne LED-Anzeige blinkt.

Hier ist der Abschnitt lernen Sie den Plextalk kennen zu Ende. Beachten Sie bitte, dass dieses Kapitel nur die wichtigsten Funktionen beschreibt, die man zum Benutzen des Gerätes benötigt.

Wenn Sie detaillierte Informationen benötigen oder einfach genau wissen wollen, was der Plextalk alles kann, schlagen Sie bitte im jetzt folgenden Benutzerhandbuch nach. In ihm können Sie alle Möglichkeiten des Gerätes kennen lernen.

Teil 2: Benutzerhandbuch

Willkommen zu Plextalk

Vielen Dank, dass Sie den Plextalk gekauft haben! Wir hoffen, dass Sie das Hören von digitalen Büchern mit unserem Produkt genießen. Es wurde speziell für Menschen mit Seh- und anderen Leseschwierigkeiten entwickelt, kann mit Akku betrieben werden und ist sowohl zuverlässig als auch benutzerfreundlich. Wenn Sie Fragen zur Benutzung des Plextalk haben, oder falls Probleme auftreten, kontaktieren Sie bitte den Händler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Viel Spaß!

1: Einleitung

1.1: Zu Ihrer Sicherheit

Wichtiger Hinweis: Bei Nichtbeachtung dieser Warnhinweise kann die Garantie erlöschen. Außerdem könnten sie sich bei Nichtbeachtung ernste Verletzungen zuziehen.

- Falls der Plextalk auf irgendeine Weise nicht richtig zu funktionieren scheint, nehmen Sie bitte sobald wie möglich Kontakt zu Ihrem Händler auf.
- Falls Sie seltsame Geräusche hören, bzw. Rauch oder einen anderen Geruch, der aus dem Plextalk kommt wahrnehmen, schalten Sie das Gerät sofort aus.
- Benutzen Sie den Plextalk bitte nur in waagerechter Position.
- Bitte verhindern Sie, dass Sand oder Staub in Kontakt mit dem Plextalk gerät, da dies zu Fehlfunktionen führen und eine Reparatur unmöglich machen könnte.
- Benutzen Sie den Plextalk nicht an Orten, an denen starke Radiowellen oder andere Strahlungen ausgesendet werden.
- Benutzen Sie den Plextalk nicht in der Nähe von anderen elektrischen Geräten wie Radios, Fernsehern oder Tunern, da er Störgeräusche von diesen Geräten empfangen könnte.
- Benutzen Sie keinen Netzadapter, der nicht für den Plextalk hergestellt wurde. Benutzen Sie keine Netzadapter, die zur Benutzung inländischer Geräte im Ausland hergestellt wurden.

- An folgenden Orten darf der Plextalk weder benutzt noch aufbewahrt werden, da er dort beschädigt werden könnte:
 - In der Sonne stehenden Autos mit geschlossenen Fenstern.
 - In direktem Sonnenlicht oder nahe von Heizlüftern Heizkörpern, Öfen usw.
 - An Orten mit starker Vibration, z. B. auf Waschmaschinen.
 - An Orten mit starkem Magnetfeld, z. B. in der Nähe von Lautsprechern.
- Benutzen Sie zum Entfernen von Schmutz und Staub bitte ein weiches mit verdünntem neutralem Reinigungsmittel angefeuchtetes Tuch. Trocknen Sie dann die gesäuberten Stellen mit einem Tuch.
- Ziehen Sie immer den Netzadapterstecker aus der Buchse im Plextalk, bevor Sie ihn reinigen.
- Reinigen Sie CDs mit einem weichen Tuch, um Schmutz auf der Oberfläche zu entfernen.
- Reiben Sie geradlinig, in der Mitte der CD beginnend nach außen. Wischen Sie nicht in Kreisbewegungen über die CD.
- Benutzen Sie Ihren Player nicht während eines Gewitters.
- Benutzen Sie Ihren Player nicht in der Nähe von Wasser, z. B. in einem Badezimmer.
- Stecken Sie den Netzstecker weder aus noch ein, wenn Ihre Hände nass sind.
- Lösen Sie den Akku nicht aus dem Gerät.
- Erhitzen Sie den Akku nicht in einer Mikrowelle, auf einem Kocher oder ähnlichem.
- Benutzen Sie nur den Akku, der sich im Plextalk befindet.
- Der Akku kann nur von Plextor oder Ihrem Händler bezogen und ausgetauscht werden.
- Versuchen Sie auf keinen Fall, Ihren Player selbst zu reparieren, zu zerlegen oder zu modifizieren.
- Falls Flüssigkeit oder Metallteile in den Plextalk geraten sollten, ziehen Sie sofort den Netzstecker.
- Hören Sie für längere Zeitintervalle nicht mit sehr hoher Lautstärke, da dies Ihrem Gehör schaden kann, besonders wenn Kopfhörer benutzt werden.
- Ziehen Sie den Netzadapterstecker nicht am Kabel aus dem Plextalk.
- Stellen Sie sicher, dass der Plextalk mit dem Netzadapter und dieser durch den Netzstecker mit der Steckdose fest verbunden sind.

- Die CD dreht sich mit hoher Geschwindigkeit. Kleben Sie keine besonders dicken Objekte, z. B. Braillebeschriftungen, auf die Oberfläche.
- Der Plextalk ist nur mit runden CDs kompatibel. Anders geformte CDs, z. B. Business-Card Discs, können zu Fehlfunktionen führen und sollten nicht benutzt werden.

1.2: Pflege des Akkus

Laden

Wenn Sie den Plextalk zum ersten Mal benutzen oder falls Sie ihn länger als einen Monat nicht mehr benutzt haben, schließen Sie ihn für mindestens 24 Stunden an das Stromnetz an, damit die eingebaute Batterie für die interne Uhr neu geladen werden kann. Im Normalfall wird der Akku in vier Stunden komplett aufgeladen.

Um die Akkulebensdauer möglichst lange zu erhalten, empfehlen wir, folgende Schritte alle sechs Monate durchzuführen:

Laden Sie den Akku komplett auf. Benutzen Sie ihn dann, bis der Plextalk nicht mehr damit arbeitet. Laden Sie den Akku dann wieder auf und lassen Sie den Plextalk 24 Stunden lang mit dem Stromnetz verbunden.

Über die Akkulebensdauer

Die Lebensdauer des Akkus hängt davon ab, wie oft er benutzt und wieder aufgeladen wird. Mit der Zeit sinkt die Kapazität des Akkus. Wenn die Akkulaufzeit nach einer Ladung zu kurz wird, müssen Sie den Akku durch einen neuen ersetzen. Tauschen Sie den Akku nicht selbst aus, lassen Sie das von Ihrem Händler durchführen. Öffnen Sie nicht selbst das Akkufach. Entfernen Sie auf keinen Fall selbst den Akku. Die Akkulaufzeit kann durch die Umgebungstemperatur und andere Umweltbedingungen beeinflusst werden.

Akkubetrieb

Der Plextalk schaltet sich automatisch aus, wenn der Akku leer ist.

Durch Drücken und Gedrückthalten der Play- Stoptaste können Sie jederzeit den Ladestatus des Akkus abfragen. Diese Information wird ausgegeben, wenn der Player nicht im Netzbetrieb arbeitet und eine CD eingelegt ist.

1.3: Eigenschaften des Plextalk

Der Plextalk verfügt über viele Abspielmöglichkeiten. Er bietet außergewöhnlich hohe Leistung in einem Akkubetriebenen, zuverlässigen und benutzerfreundlichen Gerät. Der Player unterstützt verschiedene Audioformate. Er wurde so konzipiert, dass ältere Menschen ihn ohne Schwierigkeiten benutzen können. Er besitzt einen wieder aufladbaren Akku, mit dessen Hilfe man ihn bis zu fünf Stunden lang netzunabhängig benutzen kann, bevor der Akku wieder aufgeladen werden muss.

1.4: Hauptmerkmale

Stilvolle Form. Gemacht für ältere Menschen. Bietet unkomplizierte und zuverlässige Wiedergabe von Musik- (CDDA), MP3- und Daisy 2.0 oder 2.02 CDs. Die Sprachführung beim Navigieren vereinfacht die Benutzung. Einfaches Einlegen von CDs durch einen Schlitz an der Vorderseite. Eingebauter Hochleistungslautsprecher. Eingebauter wieder aufladbarer Akku, die Laufzeit beträgt bis zu fünf Stunden.

- Schlafmodusfunktion
- Zeitsprungfunktion zum einfachen Navigieren
- Gehe zu Seite und Gehe zu Überschrift Funktion
- Lesezeichen können durch Eingabe einer Zahl gesetzt, gelöscht und angesprungen werden.
- Die verstellbare Abspielgeschwindigkeit macht das Zuhören angenehmer.

1.5: Inhalt der Verpackung

- Ein Plextalk
- Ein Netzteil mit Netzkabel
- Eine Plastikhülle, enthält Dokumentation: Kurzreferenz in Schwarzschrift, Zu Ihrer Sicherheit, eine Kompatibilitätserklärung in Schwarzschrift, Benutzerhandbuch-CD.

1.6: Über die Benutzerhandbuch-CD

Auf der Benutzerhandbuch-CD befindet sich die deutschsprachige Bedienungsanleitung im Daisy- und im Textformat.

1.7: Bewahren Sie die Verpackung auf

Bewahren Sie nach dem Auspacken bitte die Verpackung auf. Der Karton und das Verpackungsmaterial wurden so entwickelt und wurfgetestet, dass der Plextalk darin auch härtere Behandlung übersteht, und trotzdem voll funktionsfähig ankommt. Wir hoffen, dass Sie Ihren Plextalk nie an uns zurückschicken müssen. Aber falls doch, tun Sie dies bitte in der Originalverpackung.

1.8: Orientierung auf dem Player

Stellen Sie den Plextalk so auf eine Oberfläche, dass die Tasten nach oben zeigen. Drehen Sie das Gerät so, dass der große eingebaute Lautsprecher sich rechts oben befindet und der CD-Einschubschlitz zu ihnen zeigt.

1.9: Verbinden mit dem Stromnetz

Wenn Sie den Plextalk zum ersten mal benutzen, sollten Sie ihn mit einer Steckdose verbinden. Der Akku könnte sich während des Versands entladen haben, obwohl er vor dem Verlassen der Fabrik geladen wurde.

Das Netz- und Ladegerät des Plextalk besitzt ein Kabel, welches in eine Steckdose gesteckt wird, sowie ein weiteres Kabel, das mit dem sich am Kabelende befindenden runden Stecker mit dem Plextalk verbunden wird. Stecken Sie den kleinen runden Stecker in die Buchse an der Rückseite des Plextalk. Stecken Sie dann den Netzstecker, an dem sich zwei Stifte befinden, in eine Steckdose.

1.10: Das Gerät ein- oder ausschalten

Der runde Ein- Ausknopf ist etwas in das Gerät eingelassen und befindet sich auf der Oberseite rechts in der Mitte.

a: Um das Gerät einzuschalten, drücken Sie den Knopf und halten Sie ihn für etwa eine Sekunde lang gedrückt, lassen Sie ihn danach bitte los. Es sind dann Töne zu hören, an denen Sie erkennen können, dass der Player jetzt aktiv ist. Zugleich leuchtet eine grüne LED-Anzeige auf.

b: Um das Gerät auszuschalten, drücken Sie den Ein- Ausknopf und halten Sie ihn für etwa eine Sekunde lang gedrückt. Die Ausschalttöne sind zu hören, die grüne LED-Anzeige blinkt zuerst und geht dann aus.

1.11: Ausschalten erzwingen

Falls der Plextalk nicht mehr auf Tastendrücke reagiert, können Sie das Ausschalten erzwingen, indem Sie die Schlafmodustaste und die Ein- Austaste acht Sekunden lang zusammen drücken.

1.12: Einlegen oder Auswerfen der Benutzerhandbuch Daisy-CD

Schieben Sie die CD in den Schlitz, der sich an der Gerätevorderseite unter der kleinen Vertiefung am vorderen Geräteband befindet. Schieben Sie die CD richtig herum in das Gerät, ansonsten werden Sie die Fehlermeldung "CD ist ungültig oder beschädigt" hören. Der Plextalk sollte folgendes ausgeben "CD. Daisytitel. Plextalk Benutzerhandbuch". Um die CD auszuwerfen, drücken Sie die quadratisch geformte CD-Ausgabetaste, welche sich in der rechten unteren Ecke der Geräteoberseite befindet. Ein Motor wird die CD dann automatisch ausgeben. Nachdem der Plextalk die CD-Ausgabe beendet hat, ziehen Sie die CD bitte komplett aus dem Schlitz und stecken Sie sie in ihre Hülle.

1.13: Tastenbeschreibungsfunktion

Mit dieser Funktion können Sie schnell herausfinden, was eine Taste an Ihrem Player tut. Um die Funktion zu nutzen, drücken Sie eine beliebige Taste am Gerät, während sich eine CD in ihm befindet. Eine Funktionsbeschreibung der gedrückten Taste wird gesprochen. Diese Funktion ist besonders für Anfänger nützlich.

2: Lage der Tasten

2.1: Geräteoberseite

In der oberen Mitte der Geräteoberseite befinden sich drei Paare von jeweils zwei Tasten, nach oben und nach unten. Diese Tasten haben die Form eines Halbmondes. Von links nach rechts sind das die Klang-, Lautstärke- und Abspielgeschwindigkeitssteuertasten. Drücken Sie eine der oberen Tasten, um den Klang zu ändern bzw. die Lautstärke oder die Geschwindigkeit zu erhöhen. Drücken Sie eine der unteren Tasten, um den Klang zu ändern, bzw. die Lautstärke oder die Geschwindigkeit zu verringern. Diesen Tasten wurden außerdem Nummern von eins bis sechs zugeordnet:

- Klang nach oben: Nummer eins
- Lautstärke nach oben: Nummer zwei
- Geschwindigkeit nach oben: Nummer drei

- Klang nach unten: Nummer vier
- Lautstärke nach unten: Nummer fünf
- Geschwindigkeit nach unten: Nummer sechs

In der Mitte der Geräteoberseite finden Sie die vier Navigationstasten, welche nach links, rechts, oben und unten zeigen. Mit diesen Tasten können Sie von Seite zu Seite, Kapitel zu Kapitel oder Abschnitt zu Abschnitt springen. Außerdem wurden diesen Tasten die Nummern sieben, acht, neun und null zugeordnet:

- Nach-Links-Taste: Nummer sieben
- Nach-Oben-Taste: Nummer acht
- Nach-Rechts-Taste: Nummer neun
- Nach-Unten-Taste: Nummer null

Unter diesen Tasten finden Sie in der Mitte eine große rechteckige Taste. Das ist die Play- und Stoptaste. Links davon befindet sich die Zurück-, rechts davon die Vorwärtstaste. Mit den beiden Tasten links und rechts der Play-/Stoptaste können Sie auch eine Eingabe abbrechen, mit der Play-/Stoptaste selbst wird eine Eingabe bestätigt.

Rechts von diesen drei Tasten in der rechten unteren Ecke der Geräteoberseite befindet sich die quadratische CD-Ausgabetaste. Mit ihr kann eine sich im Gerät befindende CD ausgeworfen werden. Über der CD-Ausgabetaste, rechts in der Mitte der Geräteoberseite, befindet sich die runde, vertiefte Ein-/Ausschalttaste. Links neben der Ein-/Ausschalttaste befindet sich eine kleine runde Taste, die zur Steuerung des Schlafmodus' dient. Mit ihr können Sie die Einschlafzeit auf 30, 60, 90 und 120 Minuten oder auf aus stellen. Links auf der Geräteoberseite finden Sie die oval geformte Seitentaste, mit deren Hilfe Sie direkt zu bestimmten Seiten und Überschriften springen können. Unter der Seitentaste, in der linken unteren Ecke der Geräteoberseite, finden Sie die Lesezeigentaste, welche die Form eines rechtwinkligen Dreiecks hat. Sie dient zum Setzen und Löschen von Lesezeichen.

2.2: Gerätevorderseite

Der CD-Einschub- und -Auswurfschlitze befindet sich an der Gerätevorderseite. In ihn kann eine Daisy-, Musik- oder MP3-CD gesteckt werden. Sobald eine CD zu etwa drei Vierteln

eingeschoben wurde, zieht der Plextalk sie automatisch ein. Falls die CD verkehrt herum eingeschoben wurde, sagt der Plextalk "CD ist ungültig oder beschädigt".

2.3: Gerätehinterseite

Links an der Gerätehinterseite befindet sich der Netzanschluss, der zur Verbindung des Plextalks mit dem Stromnetz dient.

2.4: Die linke Geräteseite

An ihr befinden sich zwei Buchsen. An die untere können Kopfhörer oder externe Lautsprecher angeschlossen werden. An die obere kann ein Fußschalter gesteckt werden, um ohne Zuhilfenahme der Hände das Abspielen zu starten und zu stoppen.

3: Grundfunktionen

3.1: Abspielen und Stoppen

Mit der Play- und Stoptaste können Sie die Wiedergabe von Daisy-, Musik- und MP3-CDs starten und stoppen. Um die Wiedergabe anzuhalten, drücken Sie die Play- und Stoptaste. Um die Wiedergabe fortzusetzen, drücken Sie die Play- und Stoptaste erneut.

3.2: Zurück- und Vorspulen

Mit den Tasten Zurück und Vorwärts können Sie in hoher Geschwindigkeit zurück- und vorspulen. Um Zurückzuspulen, halten Sie die Zurücktaste gedrückt. Um Vorzuspulen, halten Sie die Vorwärtstaste gedrückt. Während des Spulens hören Sie hohe Töne, wie sie auch beim Zurück- und Vorspulen von Kassetten wahrnehmbar sind. Die Spulgeschwindigkeit wird dabei beschleunigt. Zuerst wird vierfach, dann achtfach und dann sechzehnfach gespult. Sobald die dritte Geschwindigkeitsstufe (sechzehnfach) erreicht ist, können Sie die Zurück- bzw. Vorwärtstaste loslassen. Der Plextalk spult dann automatisch so lange weiter, bis Sie den Vorgang durch Drücken der Play- Stoptaste unterbrechen.

3.3: Die Lautstärke einstellen

Die Lautstärketasten befinden sich oben in der Mitte der Geräteoberseite. Sie finden dort drei Tastenpaare (jeweils nach oben und nach unten), jede Taste hat die Form eines Halbmondes. Die Lautstärketasten sind größer als die vier anderen. Drücken Sie die

obere der beiden Tasten, um die Lautstärke zu erhöhen, drücken Sie die untere, um sie zu verringern. Die Lautstärke kann in 21 Schritten zwischen null und zwanzig eingestellt werden. Wenn Sie eine der beiden Tasten gedrückt halten, wird die Lautstärke immer weiter erhöht, bzw. verringert. Um wieder die Standardlautstärke einzustellen, drücken Sie die beiden Lautstärketasten zusammen.

3.4: Die Sprachführungslautstärke einstellen

Die Sprachführungslautstärke kann eingestellt werden, indem man die Seitentaste zusammen mit einer der Lautstärketasten drückt.

a: Um die Sprachführungslautstärke zu erhöhen, drücken Sie die Seitentaste, halten Sie sie gedrückt und drücken Sie zusätzlich die obere der beiden Lautstärketasten.

b: Um die Sprachführungslautstärke zu verringern, drücken Sie die Seitentaste, halten Sie sie gedrückt und drücken Sie zusätzlich die untere der beiden Lautstärketasten.

3.5: Den Klang einstellen

Die Klangeinstellungstasten liegen links neben den Lautstärketasten und sind kleiner als diese.

a: Drücken Sie die obere Taste, um den Klangwert zu erhöhen.

b: Drücken Sie die untere Taste, um den Klangwert zu verringern.

Der Klang kann zwischen minus 6 und plus 6 eingestellt werden, Standardwert ist null. Um wieder den Standardklangwert einzustellen, drücken Sie die beiden Klangeinstellstasten zusammen.

3.6: Die Abspielgeschwindigkeit einstellen

Die Geschwindigkeitseinstellstasten liegen rechts neben den Lautstärketasten und sind kleiner als diese.

a: Drücken Sie die obere Taste, um die Abspielgeschwindigkeit zu erhöhen.

b: Drücken Sie die untere Taste, um die Abspielgeschwindigkeit zu verringern.

Die Abspielgeschwindigkeit kann zwischen minus 2 und plus 8 eingestellt werden, Standardwert ist null. Um wieder den Standardabspielgeschwindigkeitswert einzustellen, drücken Sie die beiden Geschwindigkeitseinstellstasten zusammen.

4: Die aktuelle Position im Daisybuch hören

Um Informationen zum aktuellen Daisybuch wie Laufzeitinfos, Akkustand und Systeminfos zu hören, drücken Sie die Play-/Stoptaste und halten Sie sie gedrückt. Um Seiten- und Überschriftsinformationen zu hören, drücken Sie die Seitentaste und halten Sie sie gedrückt.

4.1: Verfügbare Informationen

4.1.1: Verfügbare Informationen im Abschnitt "Aktuelle Position"

- Abgelaufen: Zeit zwischen dem Beginn des Buches und der aktuellen Position
- Rest: Zeit zwischen der aktuellen Position und dem Ende des Buches
- Gesamt: Gesamtspielzeit des Buches

4.1.2: Verfügbare Informationen im Abschnitt "Akkueigenschaften"

- Aktuelle Stromquelle: Gerade benutzte Stromquelle, Netzstrom oder Akku
- Akkustatus: Aktueller Status des Akkus, wird geladen, voll aufgeladen, bei Akkubetrieb und eingelegter CD die Akkukapazität in Prozent.

4.1.3: Verfügbare Informationen im Abschnitt "Systemeigenschaften"

- Systemversion
- Seriennummer

4.1.4: Verfügbare Informationen im Abschnitt "Seiteninformationen"

- Seitennummer: Nummer der aktuellen Seite im Buch

Hinweis: Falls sich im Titel Einführungs- oder Sonderseiten befinden, wird zusätzlich deren Anzahl angesagt.

- Seiten insgesamt: Gesamtzahl der Seiten im aktuellen Buch

4.1.5: Verfügbare Informationen im Abschnitt "Überschriftsinformationen"

- Überschriftennummer: Nummer der aktuellen Überschrift im Buch
- Überschriften insgesamt: Gesamtzahl der Überschriften im aktuellen Titel

Außerdem wird die aktuelle Überschrift abgespielt.

5: In einem Daisybuch navigieren

In der Mitte der Geräteoberseite finden Sie vier Tasten. An deren Innenseite befindet sich ein Halbkreis, der nach oben, links, unten, bzw. rechts zeigt. Mit ihnen können Sie sich zwischen Buchelementen hin- und herbewegen: Von Buchtitel zu Buchtitel, von Seite zu Seite, von Kapitel zu Kapitel, von Abschnitt zu Abschnitt usw. Daisy-Bücher werden mit Überschriftsmarken für Kapitel, Abschnitte usw. versehen, die es ermöglichen, sich durch Drücken der Nach-Links- bzw. der Nach-Rechts-Taste von Buchelement zu Buchelement zu bewegen.

* **Hinweis:** Welche Elemente eines Buches, Seiten, Kapitel, Abschnitte, Absätze usw., navigierbar sind, hängt vom Ersteller des Daisybuches ab.

5.1: Einen Titel auswählen

Wenn sich auf einer CD mehrere Daisytitel befinden, wählen Sie zuerst einen Buchtitel aus. Drücken Sie zuerst die Nach-Oben- oder die Nach-Unten-Taste so oft, bis Sie das Wort "Titel" hören. Der Plextalk spricht den aktuell ausgewählten Titel. Drücken Sie dann die Nach-Links- oder die Nach-Rechts-Taste so oft, bis Sie den gewünschten Titel hören. Der ausgewählte Titel wird dann automatisch abgespielt.

5.2: Ebenen- bzw. Abschnittsweise navigieren

Um direkt zu einer bestimmten Überschrift zu springen:

- Drücken Sie die Seitentaste zwei Mal, die Sprachführung sagt: "Gehe zu Überschrift:"
- Geben Sie die Nummer der Überschrift ein, zu der Sie springen möchten. Wie in einem früheren Abschnitt erwähnt, funktionieren viele Tasten des Geräts auch als Nummern (siehe Abschnitt 2.1).
- Drücken Sie die Eingabetaste, um zu Bestätigen oder die Abbrechentaste, um den Vorgang abzuberechnen.

Falls Sie eine gültige Überschriftennummer eingegeben und mit der Eingabetaste bestätigt haben, springt der Plextalk zu dieser Überschrift und startet dort automatisch die Wiedergabe.

Falls Sie eine ungültige Überschriftennummer eingegeben haben, wird von der Sprachführung eine Fehlermeldung ausgegeben.

Um zwischen Überschriften sequentiell zu springen (zu blättern), gehen Sie folgendermaßen vor:

Drücken Sie die Nach-Oben- oder die Nach-Unten-Taste, um eine Ebene auszuwählen. Standard ist Ebene eins. Um sich in der gewählten Ebene Abschnittsweise vorwärts oder zurück zu bewegen, drücken Sie die Nach-Rechts- bzw. die Nach-Links-Taste. Der Plextalk gibt den Titel dann beginnend mit dem gewählten Abschnitt wieder. Die verschiedenen Ebenen werden benutzt, um zwischen Textstrukturmerkmalen wie Kapiteln, Unterkapiteln, Abschnitten usw. unterscheiden zu können. Durch drücken der Nach-Oben- bzw. der Nach-Unten-Taste können Sie also wählen, ob Sie sich Kapitel-, Unterkapitel- Abschnittsweise usw. durch das Buch bewegen möchten. Das springen wird dann, wie schon gesagt, mit den Tasten Nach-Links und Nach-Rechts durchgeführt. Welche Textstrukturmerkmale und wie viele Ebenen in einem Daisytitel existieren, bestimmt der Ersteller des Daisybuches.

Wenn beim Rückwärtsspringen keine weitere Überschrift vorhanden ist, springt der Plextalk an den Anfang des Buches und sagt: "Anfang des Titels".

Wenn beim Vorwärtsspringen keine weitere Überschrift vorhanden ist, springt der Plextalk an das Ende des Buches und sagt: "Ende des Titels".

Hinweis: Wenn Sie nicht auf Ebene eins navigieren, werden zusätzlich zu den Überschriften der aktuellen Stufe auch immer die auf höherer Ebene liegenden mit einbezogen. Navigieren Sie z. B. auf Ebene drei, werden auch alle Überschriften der Ebene zwei und der Ebene eins angesprungen. Wenn Sie auf Ebene eins navigieren, wird nur zu Überschriften der Ebene eins gesprungen.

5.3: Seitenweise navigieren

Um direkt zu einer bestimmten Seite zu springen:

- Drücken Sie die Seitentaste einmal, die Sprachführung sagt: "Gehe zu Seite:"
- Geben Sie die Nummer der Seite ein, zu der Sie springen möchten. Wie in einem früheren Abschnitt erwähnt, funktionieren viele Tasten des Geräts auch als Nummern (siehe Abschnitt 2.1).
- Drücken Sie die Eingabetaste, um zu bestätigen oder die Abbrechentaste, um den Vorgang abzubrechen.

Falls Sie eine gültige Seitennummer eingegeben und mit der Eingabetaste bestätigt haben, springt der Plextalk zu dieser Seite und startet dort automatisch die Wiedergabe.

Falls Sie eine ungültige Seitennummer eingegeben haben, wird von der Sprachführung eine Fehlermeldung ausgegeben.

Um Sequentiell zwischen Seiten zu navigieren (Blättern), gehen Sie folgendermaßen vor: Drücken Sie zuerst die Nach-Oben- oder die Nach-Unten-Taste, bis Sie "Seite" hören. Drücken Sie dann die Nach-Links- oder die Nach-Rechts-Taste. Sie springen dadurch von Seite zu Seite.

Falls beim Rückwärtsblättern keine Seitenmarke mehr gefunden wird, springt der Plextalk zum Titelanfang und sagt: "Anfang des Titels".

Falls beim Vorwärtsblättern keine Seitenmarke mehr gefunden wird, springt der Plextalk zum Titelseende und sagt: "Ende des Titels".

Hinweis: Falls sich im aktuellen Titel keine Seitenmarken befinden, ist der Punkt "Seite" beim auswählen mit den Tasten Nach-Oben und Nach-Unten nicht verfügbar.

Hinweis: Es gibt drei Arten von Seitenmarken: Normal, Einführungsseite und Sonderseite. Einführungsseiten können sich am Buchanfang, vor den regulären Seiten befinden. Sonderseiten können sich irgendwo im Buch, nicht aber am Buchanfang befinden. Zu Einführungs- und Sonderseiten können Sie nicht durch Eingabe einer Nummer, sondern nur durch Blättern mit den Tasten Nach-Links und Nach-Rechts gelangen.

5.4: Gruppenweise navigieren

Gruppen werden benutzt, um Abschnitte noch weiter zu unterteilen. Um sich gruppenweise zu bewegen, Drücken Sie die Nach-Oben- oder die Nach-Unten-Taste so oft, bis Sie "Gruppe" hören. Um zur nächsten bzw. vorigen Gruppe zu springen, drücken Sie die Nach-Rechts- bzw. die Nach-Links-Taste. Ein Daisybuchhersteller könnte z. B. jeden Absatz mit einer Gruppenmarke versehen. Dann könnte der Hörer des Buches schnell von Absatz zu Absatz springen.

Falls sich in einem Daisytitel keine Gruppenmarken befinden, können Sie "Gruppe" mit den Tasten Nach-Oben bzw. Nach-Unten nicht anwählen.

5.5: Navigieren mit Hilfe von Zeitintervallen

Um sich in bestimmten Zeitintervallen vorwärts oder rückwärts zu bewegen, drücken Sie die Nach-Oben- bzw. die Nach-Unten-Taste so oft, bis Sie "Zeit" hören. Um sich nun

minutenweise vorwärts oder rückwärts zu bewegen, drücken Sie die Nach-Rechts- bzw. die Nach-Links-Taste. Sie können sich auch in Zehn-Minuten-Intervallen vorwärts oder rückwärts bewegen. Drücken Sie dazu zuerst die Nach-Oben- bzw. die Nach-Unten-Taste bis Sie "Zeit" hören. Drücken Sie dann die Nach-Links- bzw. die Nach-Rechts-Taste und halten Sie sie gedrückt. Der Plextalk sagt z. B. "Zehn Minuten, 20 Minuten, 30 Minuten" usw. Wenn Sie in der Nähe der gewünschten Zeit angekommen sind, lassen Sie die Taste los. Um genau zur gewünschten Zeit zu springen, drücken Sie die Nach-Links- oder die Nach-Rechts-Taste so oft, bis Sie die gewünschte Zeit erreicht haben.

5.6: Zum Anfang oder Ende eines Titels springen

Um sich zum Anfang oder Ende eines Titels zu bewegen, drücken Sie zuerst die Nach-Oben- bzw. die Nach-Unten-Taste bis Sie "Zum Anfang oder Ende" hören. Um nun zum Titelanfang zu springen, drücken Sie die Nach-Links-Taste. Um zum Ende zu springen, drücken Sie die Nach-Rechts-Taste.

5.7: Phrasenweise navigieren

Phrasen sind die kleinsten Einheiten eines Daisytitels. Jeder Sprecher macht beim Lesen Atempausen. Eine Phrase ist ein Satz oder Satzteil zwischen zwei Atempausen. Eine einzelne gesprochene Phrase dauert normalerweise wenige bis zu mehr als zehn Sekunden. Phrasen sind also Sinneinheiten, die sich aus Pausen, z. B. aus Atempausen, ergeben. Sie können phrasenweise zurückspringen, wenn Sie z. B. etwas nicht richtig verstanden haben. Um eine Phrase zurückzuspringen, drücken Sie einmal die Zurücktaste. Um eine Phrase vorwärts zu springen, drücken Sie einmal die Vorwärtstaste.

5.8: Lesezeichen

Mit Hilfe der Lesezeichentaste können Sie sich bestimmte Stellen in einem Daisybuch markieren, um Sie später schnell wiederzufinden.

5.8.1: Lesezeicheninformationen hören

Um Lesezeicheninformationen während laufender oder gestoppter Wiedergabe zu hören, gehen Sie folgendermaßen vor:

- Drücken Sie die Lesezeichentaste und halten Sie sie gedrückt.
- Es wird die Nummer des aktuellen Lesezeichens sowie die Lesezeichengesamtzahl gesprochen.

Hinweis: Falls sich im aktuellen Titel oder Album keine Lesezeichen befinden, sagt der Plextalk "Lesezeichen nicht vorhanden".

5.8.2: Lesezeichen setzen

Um während laufender oder gestoppter Wiedergabe ein numerisches Lesezeichen zu setzen, gehen Sie folgendermaßen vor:

- Drücken Sie die Lesezeichentaste zweimal. Der Plextalk sagt: "Lesezeichen setzen:".

- Tippen Sie die Nummer ein, die Sie dem Lesezeichen geben wollen. Wie in einem früheren Abschnitt erwähnt, funktionieren viele Tasten des Geräts auch als Nummern (siehe Abschnitt 2.1).

- Drücken Sie die Eingabetaste, um die Eingabe zu bestätigen oder die Abbrechentaste um abzubrechen. Falls Sie die Nummer eines bereits existierenden Lesezeichens eingeben, gibt Ihnen der Plextalk die Möglichkeit, das existierende mit dem neuen Lesezeichen zu überschreiben oder eine andere Nummer einzugeben. Drücken Sie die Eingabetaste um das existierende mit dem neuen Lesezeichen zu überschreiben oder die Abbrechentaste, um eine neue Nummer einzugeben.

Wenn Sie eine gültige Lesezeichenummer eingegeben haben, meldet der Plextalk, dass das Lesezeichen gesetzt wurde.

Hinweis: Wo-war-ich-Lesezeichen werden automatisch eingefügt, wenn Sie sich zu einem anderen Titel oder Album bewegen oder den Plextalk ausschalten. Sie brauchen dazu nichts selbst zu tun.

Hinweis: Es können bis zu zehntausend Lesezeichen im internen Speicher des Plextalk abgelegt werden. Lesezeichen können die Nummern eins bis fünfundsechzigtausend zugeordnet werden. Wenn Sie mehr als zehntausend Lesezeichen eingeben, wird das älteste gelöscht. Der Plextalk kann Informationen der letzten eintausend eingelegten CDs speichern.

5.8.3: Zu Lesezeichen springen

Um direkt zu einem numerischen Lesezeichen zu springen:

- Drücken Sie die Lesezeichentaste einmal, die Sprachführung sagt: "Gehe zu Lesezeichen:".

- Geben Sie die Nummer des Lesezeichens ein, zu dem Sie springen möchten. Wie in einem früheren Abschnitt erwähnt, funktionieren viele Tasten des Geräts auch als Nummern (siehe Abschnitt 2.1).

- Drücken Sie die Eingabetaste, um zu bestätigen oder die Abbrechentaste, um den Vorgang abubrechen.

Falls Sie eine gültige Lesezeichnummer eingeben und mit der Eingabetaste bestätigt haben, springt der Plextalk zu diesem Lesezeichen und startet dort automatisch die Wiedergabe.

Falls Sie eine ungültige Lesezeichnummer eingegeben haben, wird von der Sprachführung eine Fehlermeldung ausgegeben.

Um Sequentiell zwischen Lesezeichen zu navigieren (Blättern), gehen Sie folgendermaßen vor:

- Drücken Sie zuerst die Nach-Oben- oder die Nach-Unten-Taste, bis Sie "Lesezeichen" hören.
- Drücken Sie dann die Nach-Links- oder die Nach-Rechts-Taste. Sie springen dadurch von Lesezeichen zu Lesezeichen.

Falls beim Rückwärtsblättern das Lesezeichen mit der niedrigsten Nummer erreicht wurde, springt der Player beim nächsten Drücken der Nach-Links-Taste zum Lesezeichen mit der höchsten Nummer.

Falls beim Vorwärtsblättern das Lesezeichen mit der höchsten Nummer erreicht wurde, springt der Player beim nächsten Drücken der Nach-Rechts-Taste zum Lesezeichen mit der niedrigsten Nummer.

Hinweis: Falls sich im aktuellen Titel keine Lesezeichen befinden, ist der Punkt "Lesezeichen" beim auswählen mit den Tasten Nach-oben und Nach-unten nicht verfügbar.

Hinweis: Beim Blättern zwischen den Lesezeichen werden diese immer numerisch, nicht nach ihrer chronologischen Reihenfolge, sortiert. Befinden Sie sich z. B. auf Lesezeichen fünf und drücken die Nach-Rechts-Taste, gelangen Sie zum nächsten numerisch höherliegenden, z. B. zu Lesezeichen sechs, auch wenn dieses zeitlich vor Lesezeichen fünf im Titel oder Album liegt.

5.8.4: Lesezeichen löschen

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie einzelne Lesezeichen, alle Lesezeichen eines Titels bzw. Albums oder alle Lesezeichen aller Titel bzw. Alben löschen können.

So löschen Sie ein numerisches Lesezeichen:

- Drücken Sie die Lesezeichentaste dreimal, die Sprachführung sagt: "Lesezeichen löschen:".

- Geben Sie die Nummer des zu löschenden Lesezeichens ein.
- Drücken Sie die Eingabetaste, um zu bestätigen oder die Abbrechentaste, um den Vorgang abubrechen.

Wenn Sie den Vorgang bestätigt haben, sagt die Sprachführung: "Gelöscht".

Falls Sie eine ungültige Lesezeichennnummer eingegeben haben, wird von der Sprachführung eine Fehlermeldung ausgegeben.

So löschen sie alle Lesezeichen eines Titels bzw. Albums:

- Drücken Sie die Lesezeichentaste dreimal, die Sprachführung sagt: "Lesezeichen löschen:".
- Geben Sie die Nummer null ein.
- Drücken Sie die Eingabetaste, um zu bestätigen oder die Abbrechentaste, um den Vorgang abubrechen.

Wenn Sie mit der Eingabetaste bestätigen, sagt der Plextalk "Alle Lesezeichen dieses Titels" bzw. "dieses Albums" wurden gelöscht.

So löschen Sie alle Lesezeichen aller Titel bzw. Alben:

- Schalten Sie das Gerät ein, während Sie die Play- Stoptaste drücken und gedrücktthalten.
- Der Plextalk sagt: "Alle Einstellungen löschen, sind Sie sicher?".
- Wenn Sie sicher sind, drücken Sie die Eingabetaste, der Plextalk sagt: "Fertig".
- Wenn Sie sich anders besonnen haben, drücken Sie die Abbrechentaste.

Hinweis: Dieser Vorgang löscht alle Lesezeichen sowie die Lautstärke-, Klang- und Geschwindigkeitseinstellung.

5.8.5: Das Wo-War-Ich-Lesezeichen

Für jeden Daisytitel merkt sich der Plextalk automatisch die Stelle, an der die Wiedergabe zuletzt unterbrochen wurde.

6: Navigieren auf Musik- und MP3-CDs

Sie können mit dem Plextalk Musik- und MP3-CDs hören. Tatsächlich haben Sie mit dem Plextalk mehr Möglichkeiten, als mit herkömmlichen CD-Playern.

Hinweis: Die Tasten Zurück und Vorwärts funktionieren auf Musik- und MP3-CDs fast wie bei DAISY-Titeln. Obwohl sich auf Musik- und MP3-CDs keine Phrasenmarken befinden, können Sie auch auf ihnen durch kurzes Drücken der Zurück- bzw. Vorwärtstaste einige

Sekunden in die entsprechende Richtung springen. Es wird allerdings eine feste Sekundenzahl genutzt, da ja keine Phrasenmarken zum Springen zu einer Sprechpause zur Verfügung stehen.

6.1: Die aktuelle Position auf einer Musik-CD (CD-DA) hören

Durch Drücken und Gedrückthalten der Play- Stoptaste erhalten Sie Informationen zu der Musik-CD, die Sie gerade hören. Drücken Sie die Play- Stoptaste und halten Sie sie gedrückt. Der Plextalk spricht alle verfügbaren Informationen, die in vier Abschnitte aufgeteilt sind:

Aktuelle Position im Track, aktuelle Position auf der CD, Akkuinfos und Systemeigenschaften. Um Informationen zum aktuellen Track zu hören, drücken Sie die Seitentaste und halten Sie sie gedrückt.

6.2: Verfügbare Informationen

6.2.1: Verfügbare Informationen im Abschnitt "Trackinformationen"

- Abgelaufen: Die Zeit zwischen Trackanfang und der aktuellen Position im Track.
- Übrig: Die Zeit zwischen aktueller Position im Track und Trackende.
- Gesamt: Gesamtdauer des Tracks

6.2.2: Verfügbare Informationen im Abschnitt "CD-Informationen"

- Abgelaufen: Abgelaufene Zeit vom Beginn der CD bis zur aktuellen Position
- Rest: Zeitspanne zwischen der aktuellen Position und dem CD-Ende
- Gesamt: Gesamtspieldauer der CD

6.2.3: Verfügbare Informationen im Abschnitt "Akkuinformationen"

- Aktuelle Stromquelle: Gerade benutzte Stromquelle, Netzstrom oder Akku
- Akkustatus: Aktueller Status des Akkus, wird geladen, voll aufgeladen, bei Akkubetrieb und eingelegter CD: Akkukapazität in Prozent.

6.2.4: Verfügbare Informationen im Abschnitt "Systemeigenschaften"

Systemversion, Seriennummer

6.2.5: Verfügbare Informationen im Abschnitt "Aktuelle Position"

Um diese Informationen zu hören, drücken Sie die Seitentaste und halten Sie sie gedrückt.

- Aktueller Track: Nummer des aktuellen Tracks auf der CD
- Tracks insgesamt: Gesamtzahl der Tracks auf der CD

6.3: Trackweise navigieren

Das trackweise Navigieren ähnelt sehr dem Seiten- bzw. Überschriftweisen Navigieren. Sie können direkt zu bestimmten Tracks springen oder sich von Track zu Track bewegen. Die Tracks sind beginnend mit dem ersten Track auf der CD aufeinanderfolgend nummeriert.

So springen Sie direkt zu einem Track:

- Drücken Sie die Seitentaste einmal. Die Sprachführung sagt: "Gehe zu Track:".
- Tippen Sie die Nummer des Tracks, zu dem Sie springen möchten. Wie in einem früheren Abschnitt erwähnt, funktionieren viele Tasten des Geräts auch als Nummern (siehe Abschnitt 2.1).
- Drücken Sie die Eingabetaste, um zu bestätigen oder die Abbrechentaste, um den Vorgang abzuberechnen.

Falls Sie eine gültige Tracknummer eingegeben und mit der Eingabetaste bestätigt haben, springt der Plectalk zu diesem Track und startet dort automatisch die Wiedergabe.

Falls Sie eine ungültige Tracknummer eingegeben haben, wird von der Sprachführung eine Fehlermeldung ausgegeben.

So navigieren Sie trackweise:

- Wählen Sie mit den Tasten Nach-oben und Nach-unten "Track" aus.
- Drücken Sie die Nach-Links-Taste, um zum vorigen Track zu springen. Die Wiedergabe startet dann automatisch am Anfang dieses Tracks.

Wenn beim Rückwärtsspringen kein weiterer Track existiert, springt der Plectalk an den Anfang der CD und sagt: "Anfang des Albums".

- Drücken Sie die Nach-Rechts-Taste, um zum nächsten Track zu springen. Die Wiedergabe startet dann automatisch am Anfang dieses Tracks.

Wenn beim Vorwärtsspringen kein weiterer Track existiert, springt der Plectalk an das Ende der CD und sagt: "Ende des Albums".

Hinweis: Wenn ein Track länger als drei Sekunden läuft und Sie die Nach-Links-Taste drücken, springt der Player zum Anfang des aktuellen Tracks, wenn Sie dann innerhalb von drei Sekunden erneut die Nach-Links-Taste drücken, wird zum vorigen Track gesprungen.

6.4: Zum Anfang oder Ende springen

Um sich zum Anfang oder Ende eines Titels zu bewegen, drücken Sie zuerst die Nach-Oben- bzw. die Nach-Unten-Taste bis Sie "Zum Anfang oder Ende" hören. Um nun zum Titelanfang zu springen, drücken Sie die Nach-Links-Taste. Um zum Ende zu springen, drücken Sie die Nach-Rechts-Taste.

Folgende Tasten funktionieren auf einer Musik- bzw. MP3-CD genauso wie in einem Daisytitel:

- Lesezeigentaste: Siehe Abschnitt Lesezeichen
- Zurück- und Vorwärtstaste: Siehe Abschnitt Grundfunktionen
- Klangeinstellungstasten: Siehe Abschnitt Den Klang einstellen
- Lautstärketasten: Siehe Abschnitt Die Lautstärke einstellen
- Geschwindigkeitseinstelltasten: Siehe Abschnitt Die Abspielgeschwindigkeit einstellen

6.5: Die aktuelle Position auf einer MP3-CD hören

Durch Drücken und Gedrückthalten der Play- Stoptaste erhalten Sie Informationen zu der MP3-CD, die Sie gerade hören. Drücken Sie die Play- Stoptaste und halten Sie sie gedrückt. Der Plextalk spricht alle verfügbaren Informationen, die in drei Abschnitte aufgeteilt sind:

Aktuelle Position im Track, Akkuinfos und Systemeigenschaften. Um Informationen zum aktuellen Track zu hören, drücken Sie die Seitentaste und halten Sie sie gedrückt.

6.6: Verfügbare Informationen

6.6.1: Verfügbare Informationen im Abschnitt "Trackinformationen"

- Abgelaufen: Die Zeit zwischen Trackanfang und der aktuellen Position im Track.
- Übrig: Die Zeit zwischen aktueller Position im Track und Trackende.
- Gesamt: Gesamtdauer des Tracks

6.6.2: Verfügbare Informationen im Abschnitt "Akkuinformationen"

Aktuelle Stromquelle: Gerade benutzte Stromquelle, Netzstrom oder Akku

Akkustatus: Aktueller Status des Akkus, wird geladen, voll aufgeladen, bei Akkubetrieb und eingelegter CD: Akkukapazität in Prozent.

6.6.3: Verfügbare Informationen im Abschnitt "Systemeigenschaften"

Systemversion, Seriennummer

6.6.4: Verfügbare Informationen im Abschnitt "Aktuelle Position"

Um diese Informationen zu hören, drücken Sie die Seitentaste und halten Sie sie gedrückt.

- Aktuelles Album: Nummer des aktuellen Albums
- Aktueller Track: Nummer des aktuellen Tracks
- Tracks insgesamt: Gesamtzahl der Tracks dieses Albums
- Alben insgesamt: Gesamtzahl der Alben auf der MP3-CD

6.7: Navigieren auf einer MP3-CD

Auf einer MP3-CD können sich mehrere Alben (Ordner) befinden. Es kann deshalb Alben- und trackweise navigiert werden.

6.8: Albenweise navigieren

Das albenweise Navigieren ähnelt sehr dem trackweisen Navigieren. Sie können direkt zu bestimmten Alben springen oder sich von Album zu Album bewegen.

So springen Sie direkt zu einem Album:

- Drücken Sie die Seitentaste zweimal. Die Sprachführung sagt: "Gehe zu Album:".
- Tippen Sie die Nummer des Albums, zu dem Sie springen möchten. Wie in einem früheren Abschnitt erwähnt, funktionieren viele Tasten des Geräts auch als Nummern (siehe Abschnitt 2.1).
- Drücken Sie die Eingabetaste, um zu bestätigen oder die Abbrechentaste, um den Vorgang abzubrechen.

Falls Sie eine gültige Albumnummer eingegeben und mit der Eingabetaste bestätigt haben, springt der Plextalk zu diesem Album. Drücken Sie die Play- Stoptaste, um die Wiedergabe dort zu starten.

So navigieren Sie albenweise:

- Wählen Sie mit den Tasten Nach-Oben und Nach-Unten "Album" aus.

- Drücken Sie die Nach-Links-Taste, um zum vorigen bzw. die Nach-Rechts-Taste, um zum nächsten Album zu springen. Der Plextalk spricht die Nummer des gewählten Albums.

6.9: Trackweise navigieren

Das trackweise Navigieren ähnelt sehr dem trackweisen Navigieren auf Musik-CDs. Sie können direkt zu bestimmten Dateien springen oder sich von Datei zu Datei bewegen. Die Dateien sind beginnend mit der ersten Datei im Album aufeinanderfolgend nummeriert.

So springen Sie direkt zu einer Datei:

- Drücken Sie die Seitentaste einmal. Die Sprachführung sagt: "Gehe zu Track:".
- Tippen Sie die Nummer der Datei, zu der Sie springen möchten.
- Drücken Sie die Eingabetaste, um zu bestätigen oder die Abbrechentaste, um den Vorgang abubrechen.

Falls Sie eine gültige Dateinummer eingegeben und mit der Eingabetaste bestätigt haben, springt der Plextalk zu dieser Datei und startet dort automatisch die Wiedergabe.

Falls Sie eine ungültige Dateinummer eingegeben haben, wird von der Sprachführung eine Fehlermeldung ausgegeben.

So navigieren Sie dateiweise:

- Wählen Sie mit den Tasten Nach-oben und Nach-unten "Track" aus.
- Drücken Sie die Nach-Links-Taste, um zur vorigen Datei zu springen. Die Wiedergabe startet dann automatisch am Anfang dieser Datei.

Wenn beim Rückwärtsspringen keine weitere Datei existiert, springt der Plextalk an den Anfang des Albums und sagt: "Anfang des Albums".

- Drücken Sie die Nach-Rechts-Taste, um zur nächsten Datei zu springen. Die Wiedergabe startet dann automatisch am Anfang dieser Datei.

Wenn beim Vorwärtsspringen keine weitere Datei existiert, springt der Plextalk an das Ende des Albums und sagt: "Ende des Albums".

Hinweis: Wenn eine Datei länger als drei Sekunden läuft und Sie die Nach-Links-Taste drücken, springt der Player zum Anfang der aktuellen Datei, wenn Sie dann innerhalb von drei Sekunden erneut die Nach-Links-Taste drücken, wird zur vorigen Datei gesprungen.

6.10: Zum Anfang oder Ende springen

Um sich zum Anfang oder Ende eines Titels zu bewegen, drücken Sie zuerst die Nach-Oben- bzw. die Nach-Unten-Taste bis Sie "Zum Anfang oder Ende" hören. Um nun zum Anfang des Albums zu springen, drücken Sie die Nach-Links-Taste. Um zum Ende des Albums zu springen, drücken Sie die Nach-Rechts-Taste.

7: Die Funktion Schlafmodus

Der Plextalk bietet eine Schlafmodusfunktion. Damit können Sie ihn dazu veranlassen, nach einer eingestellten Anzahl von Minuten abzuschalten. Sie können sich dann ein Buch oder eine Musik-CD anhören, wobei der Plextalk nach einer bestimmten Anzahl von Minuten automatisch ausgeht.

7.1: Einstellen des Schlafmodus

Sie können den Schlafmodus auf aus, 30, 60, 90 und 120 Minuten einstellen. Drücken Sie die Schlafmodustaste so oft bis Sie die gewünschte Einstellung hören.

7.2: Den Schlafmodus ausschalten

Drücken Sie die Schlafmodustaste so oft bis der Player "Aus" sagt.

7.3: Die verbleibende Zeit im Schlafmodus hören

Drücken Sie die Schlafmodustaste einmal, während der Schlafmodus aktiv ist. Der Plextalk sagt ihnen dann die Restzeit des Schlafmodus an.

8: Playerinformationen

Falls Sie Unterstützung von Plexor oder Ihrem Händler benötigen, kann es sein, dass Sie nach der Firmwareversion und der Seriennummer Ihres Gerätes gefragt werden. Sie bekommen diese Informationen, wenn Sie die Play- Stoptaste drücken und gedrückt halten. Nach den Laufzeit- und Akkuinformationen werden Firmwareversion und Seriennummer angesagt.

9: Fehlerbehebung

- Das Gerät geht nicht an

Dies könnte am Netzgerät liegen. Stecken Sie dessen kleinen runden Stecker bitte erneut in die sich an der Gerätehinterseite befindende Buchse am Plextalk. Stecken Sie dann den Netzstecker in eine Steckdose.

- Es kann keine CD eingeschoben werden.

Stellen Sie sicher, dass das Gerät eingeschaltet ist und sich nicht schon eine CD im Plextalk befindet.

- Die CD kann nicht ausgegeben werden.

Stellen Sie sicher, dass das Gerät eingeschaltet ist, drücken Sie dann die CD-Ausgabetaaste und halten Sie sie gedrückt.

- Die Sprachführung des Plextalk ist nie zu hören

Dies könnte an zu niedrig eingestellter Sprachführungslautstärke liegen. Erhöhen Sie die Sprachführungslautstärke bis Sie die Sprachführung hören.

- Der Player sagt "CD ist ungültig oder beschädigt".

Die CD könnte verkehrt herum in's Gerät eingelegt worden sein. Stellen Sie sicher, dass die CD mit der beschrifteten Seite nach oben zeigt. Möglicherweise ist die CD tatsächlich beschädigt. Werfen Sie in diesem Fall die CD aus.

- Der Plextalk sagt "Akkufehler"

Trennen Sie das Gerät vom Netzteil und schalten Sie es dann ein. Falls Sie nun immer noch "Akkufehler" hören, nehmen Sie bitte Kontakt zu Ihrem Händler auf.

- Der Plextalk sagt "Netzgerätfehler".

Trennen Sie bitte das Gerät vom Netzadapter und schalten Sie es dann ein. Falls Sie die Fehlermeldung weiterhin hören, stellen Sie sicher, dass Sie immer nur das mitgelieferte Netzteil verwenden, dass dessen Netzstecker fest in eine Steckdose gesteckt und dessen zweiter Stecker fest in die Buchse am Plextalk gesteckt wurde.

10: Technische Spezifikationen

Abspielbare CDs:

Ausschließlich 12 Zentimeter CDs und CD-RWs

Maße:

Länge: 172 mm

Breite: 220 mm

Höhe: 56 mm

Gewicht: 1,2 kg

Stromquellen:

Netzadapter: 90 bis 240 Volt, 50 oder 60 Hertz

Netzbuchse: 12 Volt, maximal 3 Ampair

Stromverbrauch: Maximal 25 Watt, wenn eine CD abgespielt und der Akku geladen wird.

Akkutyp: Nickel-Hydrogen

Laufzeit: Bis zu Fünf Stunden (Bei Musik-CDs ist die Akkulaufzeit geringer, da der CD-Laufwerksmotor ständig aktiv sein muss).

Abspielbare Formate: Daisy-CDs (Daisy 2.0 oder 2.02), CD-DA und MP3-CDs

Abspielbare Audioformate:

PCM, Daisy ADPCM, MPEG 1 oder 2 Layer zwei oder drei

Shinano Kenshi Co.,Ltd

6-15-26, Chuo, Ueda-Shi

Nagano-ken, 386-0012 Japan

Tel: +81 268 28-8009

Fax +81 268-22-5476

Web: WWW.plextalk.com

Übersetzt und bearbeitet von Michael Lang