

# Tastenbeschreibung

Ein/Ausschalten	Ovale Taste auf 2 Uhr
Lautstärke / Geschwindigkeit	Ovale Taste auf 2 Uhr
Lautstärke / Geschwindigkeit erhöhen	Ovale Taste auf 2 Uhr + Pfeiltaste (Pfeil nach oben) auf 3 Uhr
Lautstärke / Geschwindigkeit verringern	Ovale Taste auf 2 Uhr + Pfeiltaste (Pfeil nach unten) auf 4 Uhr

Start/Stopp	Mittlere Taste unten
Rückwärts	Taste links daneben (Pfeil nach links)
Vorwärts	Taste rechts daneben (Pfeil nach rechts)
Lesezeichen	Untere Taste links (auf 7 Uhr)
Gehe zu Seite / Überschrift	Obere Taste links (auf 8 Uhr)

Ziffernblock unter dem Display:

Bücherliste	Taste 1
Ebene/Navigationselement auswählen	Taste 2
Keine Funktion	Taste 3
Navigation rückwärts	Taste 4
„Wo bin ich“	Taste 5
Navigation vorwärts	Taste 6
Keine Funktion	Taste 7
Ebene/Navigationselement auswählen	Taste 8
Schlaf-Modus	Taste 9
Vorgang Abbrechen	Taste „*“ (Stern)
Info-Taste	Taste 0
Bestätigen	Taste „#“ (Raute)

## Weitere Funktionen

Lesezeichen-Taste einmal drücken

- Gehe zu Lesezeichen - Springt zum gesetzten Lesezeichen (Zahl eingeben und „Start / Stopp“)

Lesezeichen-Taste zweimal drücken

- Lesezeichen einfügen – Setzt ein Lesezeichen (Zahl eingeben und „Start / Stopp“. Nur „Start / Stopp“ reicht aus, Nummerierung erfolgt fortlaufend)

Lesezeichen-Taste dreimal drücken

- Lesezeichen-Liste - springt von Lesezeichen zu Lesezeichen mit Tasten 4 und 6

Lesezeichen-Taste viermal drücken

- Lesezeichen entfernen - Entfernt das gewünschte Lesezeichen (Zahl eingeben und „Start / Stopp“)

Gehe zu Seite-Taste einmal drücken

- Gehe zu Seite - Springt zur gewünschten Buchseite (Zahl eingeben und „Start / Stopp“)

Gehe zu Seite-Taste zweimal drücken

- Gehe zu Überschrift - Springt zur gewünschten Überschrift (Zahl eingeben und „Start / Stopp“)

# Kurzanleitung zum Victor Reader Wave

Beim Auspacken des Gerätes sollten Sie folgende Komponenten vorfinden:

- Victor Reader Wave, das digitale Abspielgerät für Hörbücher
- Einen AC/DC Adapter sowie zwei aufladbare Akkus, welche bereits im Akkufach des Gerätes liegen
- Eine CD-ROM im DAISY-Format; Auf dieser CD finden Sie sowohl eine Kurzanleitung als auch ein ausführliches Benutzerhandbuch.
- Ohrhörer
- Eine Tragetasche

## Die rechte Seite des Gerätes

Die Buchse für den Stromanschluss (c) ist die oberste Buchse auf der rechten Seite. Schließen Sie das Netzteil (AC/DC Adapter) mit dem einen Ende des Kabels an Ihr Gerät. Das andere Ende, an dem sich der Stecker befindet, kommt in die Steckdose.

Es folgt die Buchse für den Lineout-Anschluss (b), mit welchem sich der Victor Reader Wave zum Beispiel an eine Stereoanlage anschließen lässt.

Die rechteckig geformte Anschlussbuchse (b) hat bisher keinen Verwendungszweck.

Des Weiteren finden Sie eine Anschlussbuchse für Kopfhörer / Ohrhörer oder externe Lautsprecher (e) sowie einen Schiebeschalter zum Sperren bzw. Entsperren der Tastatur (d).

## Die Vorderseite des Victor Wave

An der Vorderseite befindet sich der Schiebeschalter zum Aufklappen des Deckels.

Unter dem Gerät finden Sie das Akkufach.

### **Das Gerät einschalten / Ausschalten**

Das Einschalten des Victor Wave erfolgt durch Drücken der oval geformten Ein- / Aus-Taste (1), die sich auf 2 Uhr befindet.

Möchten Sie den Victor Wave ausschalten, so drücken und halten Sie die Ein- / Aus-Taste (1) auf 2 Uhr.

### **Das Abspielen starten / stoppen**

Möchten Sie das Abspielen eines Hörbuches starten, so drücken Sie die „Wiedergabe/Stopp“-Taste (5), die sich auf 6 Uhr befindet. Um das Abspielen zu stoppen, betätigen Sie die „Wiedergabe/Stopp“-Taste (5) auf 6 Uhr erneut.

### **Schnelles Vor- / und Zurückspulen**

Möchten Sie vorwärts spulen, so drücken und halten Sie die Vorspul-Taste (4), welche sich auf 5 Uhr befindet.

Das Rückwärtsspulen erfolgt durch Drücken und Halten der Rückspul-Taste (6) auf 7 Uhr.

### **Die Lautstärke einstellen**

Sobald das Gerät eingeschaltet ist, wird die Ein- / Aus-Taste (1) auf 2 Uhr zur Umschalt-Taste zwischen Lautstärke und Geschwindigkeit. Drücken Sie die oval geformte Umschalt-Taste (1) auf 2 Uhr so oft, bis Sie „Lautstärke“ hören. Betätigen Sie nun die „Auf“-Taste (2) oder die „Ab“-Taste (3), um die Lautstärke zu erhöhen / zu verringern. Sie finden diese Tasten auf 3 bzw. auf 4 Uhr.

### **Die Geschwindigkeit einstellen**

Möchten Sie die Geschwindigkeit einstellen, so drücken Sie die oval geformte Umschalt-Taste (1) auf 2 Uhr so oft, bis Sie „Geschwindigkeit“ hören.

Betätigen Sie nun die „Auf“-Taste (2) auf 3 Uhr bzw. die „Ab“-Taste (3) auf 4 Uhr, bis Sie die gewünschte Geschwindigkeit erreicht haben. „-5“ ist die niedrigste Geschwindigkeit (sehr langsam), 10 die höchste Geschwindigkeit (sehr schnell).

## **Wichtige Informationen zu den Batterien**

1. Ihr Victor Reader wird mit zwei wiederaufladbaren NiMH Mignon (AA) Batterien geliefert. Die Batterien werden aufgeladen, wenn das Steckernetzteil angeschlossen ist und keine CD abgespielt wird.
2. Ein voller Ladezyklus erfolgt in etwa 7 Stunden und ermöglicht eine Laufzeit von 7 bis 9 Stunden (Wave) und 10 bis 14 Stunden (Vibe). Batterien oder Gerät können durch überladen nicht beschädigt werden.
3. Das Abspielgerät verfügt über eine automatische Abschaltung; sowohl im Batterie- als auch im Netzbetrieb. Die Abschaltung erfolgt nach 15 Minuten Nichtgebrauch (5 Minuten bei Audio CDs).
4. Es können auch handelsübliche, nicht wiederaufladbare Mignon (AA) Alkaline Batterien verwendet werden.
5. Ebenso können andere handelsübliche, wiederaufladbare Mignon (AA) Batterien verwendet werden. Diese müssen allerdings extern geladen werden. Der Victor Reader lädt nur die mitgelieferten Akkus.
6. Die mitgelieferten Batterien können auch extern geladen werden.
7. Die Ladeschaltung Ihres Geräts wird eventuell tiefentladene Akkus nicht aufladen. In diesem Fall müssen die Akkus mit einem externen Ladegerät aufgeladen werden. Nach diesem Vorgang funktioniert die interne Ladung wieder wie gewohnt.