

Plextalk PTN2 (ohne Maske) Bedienungsanleitung

Der Akku

- Wenn seine Ladung nicht mehr ausreicht, erhalten Sie einen akustischen Hinweis. Laden Sie ihn im Gerät wieder auf, indem Sie den PTN2 mit dem Netzteil an die Steckdose anschließen.
- Die Lebensdauer des Akkus hängt von der Nutzung und der Anzahl der Ladevorgänge ab. Die Ladekapazität nimmt mit der Zeit ab. Wenn die Laufzeit nach dem Aufladen zu kurz wird, muss der Akku ausgetauscht werden. Dazu wenden Sie sich bitte an unseren Service.

Hinweis: Der Akku wird normalerweise innerhalb von 4 Stunden vollständig aufgeladen. Bei der ersten Nutzung des Plextalk, oder wenn der Akku mindestens einen Monat nicht benutzt wurde, sollten Sie das Gerät jedoch mindestens 24 Stunden am Stromnetz lassen.

Die Tastaturhilfe

- Zum Einschalten der Tastaturhilfe halten Sie die Menütaste gedrückt. Der Plextalk meldet: "Tastaturhilfe ein". Wenn Sie nun eine beliebige Taste auf dem Gerät drücken, wird deren Funktion angesagt.

- Zum Ausschalten der Tastaturhilfe halten Sie die Menütaste gedrückt. Der PTN2 meldet, dass die Tastaturhilfe deaktiviert ist.

Benutzerhandbuch im Gerät

Das Plextalk-Benutzerhandbuch ist im PTN2 integriert. Um es zu starten, drücken Sie die Taste "0" auf der Zifferntastatur. Sie hören: "Benutzerhandbuch ein". Betätigen Sie nun die Start/Stopptaste, wird die Bedienungsanleitung vorgelesen. Durch erneutes Drücken der Taste "0" verlassen Sie das Benutzerhandbuch.



Dokument: 2.0090.456.96 / Stand: 06. April 2011

Plextalk PTN2 (ohne Maske)

Lieferumfang

1. PLEXTALK PTN2
2. Abdeckhaube
3. Netzteil
4. Handbuch-CD
5. Kurzanleitung

Anmerkung: Es wird dringend empfohlen, die Verpackung vollständig aufzubewahren, falls der Plextalk eingeschickt werden muss.

Inbetriebnahme

1. Stellen Sie den PTN2 so vor sich hin, dass der CD-Schlitz nach vorne zeigt. Die Buchse für das Netzteil befindet sich auf der Rückseite in der Mitte. Schließen Sie den Plextalk an die Steckdose, wenn Sie ihn zum ersten Mal in Betrieb nehmen.
2. Um das Gerät einzuschalten, halten Sie die runde Ein-/Aus-Taste gedrückt. Eine Tonfolge signalisiert Ihnen, dass der Daisyspieler gestartet wird. Möchten Sie den PTN2 ausschalten, so halten Sie die Ein/Aus-Taste erneut gedrückt. Sie hören die Meldung "ausschalten". Durch eine kurze Tonfolge wissen Sie, dass das Gerät ausgeschaltet ist.

