

# Plextalk PTR2

## Bedienungsanleitung

### Tastensperre und Tastenbeschreibungsmodus

1. An der linken Geräteseite befinden sich zwei lange Vertiefungen. In der ersten Vertiefung, die näher bei Ihnen liegt, finden Sie drei Klinkenbuchsen (weitere Information siehe Audio-Handbuch). In der weiter von Ihnen entfernt liegenden Vertiefung befindet sich ein Schalter. Schieben Sie den Schalter von sich weg, hören Sie „Tastensperre. Tastenbeschreibung an“. Die Tasten des PTR2 sind jetzt gesperrt. Stattdessen wird durch Drücken und Halten einer Taste deren Funktion erklärt.
2. Ziehen Sie den Tastensperr-Schalter zu sich hin, so wird die Tastensperre aufgehoben. Sie hören „Tastensperre. Tastenbeschreibung aus“.

### Der Akku

1. Im PTR2 arbeitet ein auswechselbarer Akku mit einer Kapazität von 2200 mAh. Die Ladezeit bei ausgeschaltetem Gerät beträgt etwa 5 Stunden.
2. Betriebszeiten:
  - Aufnahme im Daisy-Format auf CD: 2,5 Stunden
  - Abspielen einer Daisy-CD: 6 Stunden
  - Aufnahme einer Daisy-CD auf eine CF-Karte: 8 Stunden
  - Abspielen eines Daisytitels auf einer CF-Karte: 8 Stunden
  - Aufnahmen im Daisy-Format auf ein Microdrive: 7 Stunden

- Abspielen eines Daisytitels von einem Microdrive: 7 Stunden
- Aufnahmen im Musik-CD-Format auf eine Audio-CD: 2,5 Stunden
- Hören einer Musik-CD: 4 Stunden

### HINWEIS

Bei diesen Angaben handelt es sich um Näherungswerte. Die Lade- und Betriebszeit des Akkus hängt von der Umgebungstemperatur und der Nutzungsart ab. Bei vielem Spulen oder Navigieren verringert sich die Betriebszeit. Mit der Zeit nimmt die Gesamtkapazität des Akkus ab. Wird sie zu gering, empfiehlt sich der Kauf eines neuen Akkus, den Sie über unseren Service bestellen können. Wir empfehlen, den Akku ca. alle 6 Monate voll aufzuladen und ihn danach komplett leerlaufen zu lassen, wenn Sie mit dem PTR2 arbeiten. Laden Sie den Akku danach erneut vollständig auf und lassen Sie ihn dabei mindestens 24 Stunden am Stromnetz.





# Plextalk PTR2

## Lieferumfang

1. Daisyrecorder PTR2
2. 64 MB CF-Karte
3. Netzadapter
4. Akku
5. 3,5 Klinkenstecker-Audiokabel
6. USB-Kabel
7. Umhängetasche
8. CD mit Audiohandbuch
9. Eine leere 700 MB CD-Rom

## Inbetriebnahme

1. Legen Sie zuerst den Akku in den PTR2.

### HINWEIS:

Wenn Sie den PTR2 zum ersten Mal oder nach einer über einmonatigen Pause wieder benutzen, sollten Sie ihn gleich mit dem Stromnetz verbinden und mindestens 24 Stunden lang am Netz lassen.

2. Nun können Sie das Gerät einschalten. An der rechten Geräteseite fühlen Sie zwei lange Vertiefungen. In der zweiten, weiter von Ihnen entfernten Vertiefung finden Sie lediglich einen Schiebeschalter. Dies ist der Ein-/Ausschalter. Schieben Sie den Schalter von sich weg, um den PTR2 einzuschalten. Es ertönt ein kurzer Signalton, gefolgt von einer Melodie. Das Gerät meldet „Karte. Titel nicht vorhanden...“.

3. Möchten Sie den PTR2 ausschalten, so schieben Sie den Ein- / Ausschalter zu sich hin und lassen ihn dann wieder los. Das Gerät meldet „Herunterfahren“, gefolgt von einer Melodie. Abschließend ertönt ein Signalton um zu signalisieren, dass das Gerät komplett ausgeschaltet ist.

