

Victor Reader Stratus 4

Bedienungsanleitung



PAPENMEIER

Victor Reader Stratus 4

Lieferumfang

1. Daisyplayer
2. Ladegerät
3. Hörbuch auf CD mit Bedienungsanleitung

Inbetriebnahme

1. Vor der ersten Inbetriebnahme schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an. Dazu stecken Sie das Ende des mitgelieferten Netzteils in den Netzanschluss, der sich auf der Rückseite rechts befindet. Während des Ladevorgangs blinkt die Einschalttaste.

Bitte beachten: Der Victor Reader kann während des Ladevorgangs benutzt werden.

2. Schalten Sie den Victor Reader ein indem Sie die Taste 'Ein/Ausschalten' gedrückt halten. Sie hören einen Piepton und einen Begrüßungstext.

3. Schieben Sie die beiliegende CD vorne in den Schlitz des Laufwerks. Die CD enthält die aufgesprochene Bedienungsanleitung im Daisy-Format. Sie wird Ihnen automatisch vorgelesen.

Hinweis


Die zugehörige Tastaturabdeckung zur einfacheren Bedienung befindet sich bei Lieferung direkt auf dem Gerät. Möchten Sie das komplette Tastenfeld nutzen, können Sie die Maske einfach vom Gerät entfernen.


Bücherregaltaste

Lesezeichen

CD-Auswurf

CD-Laufwerk

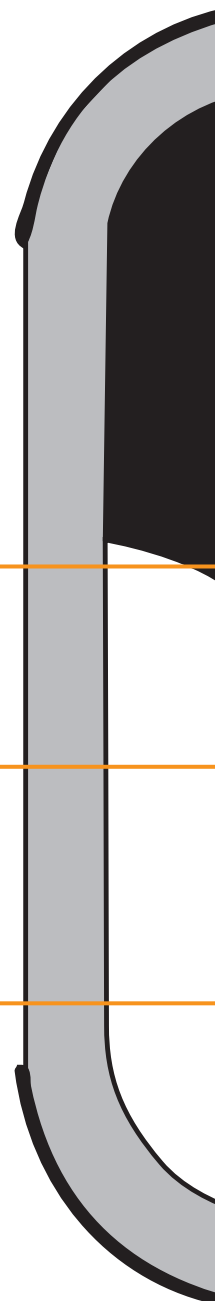

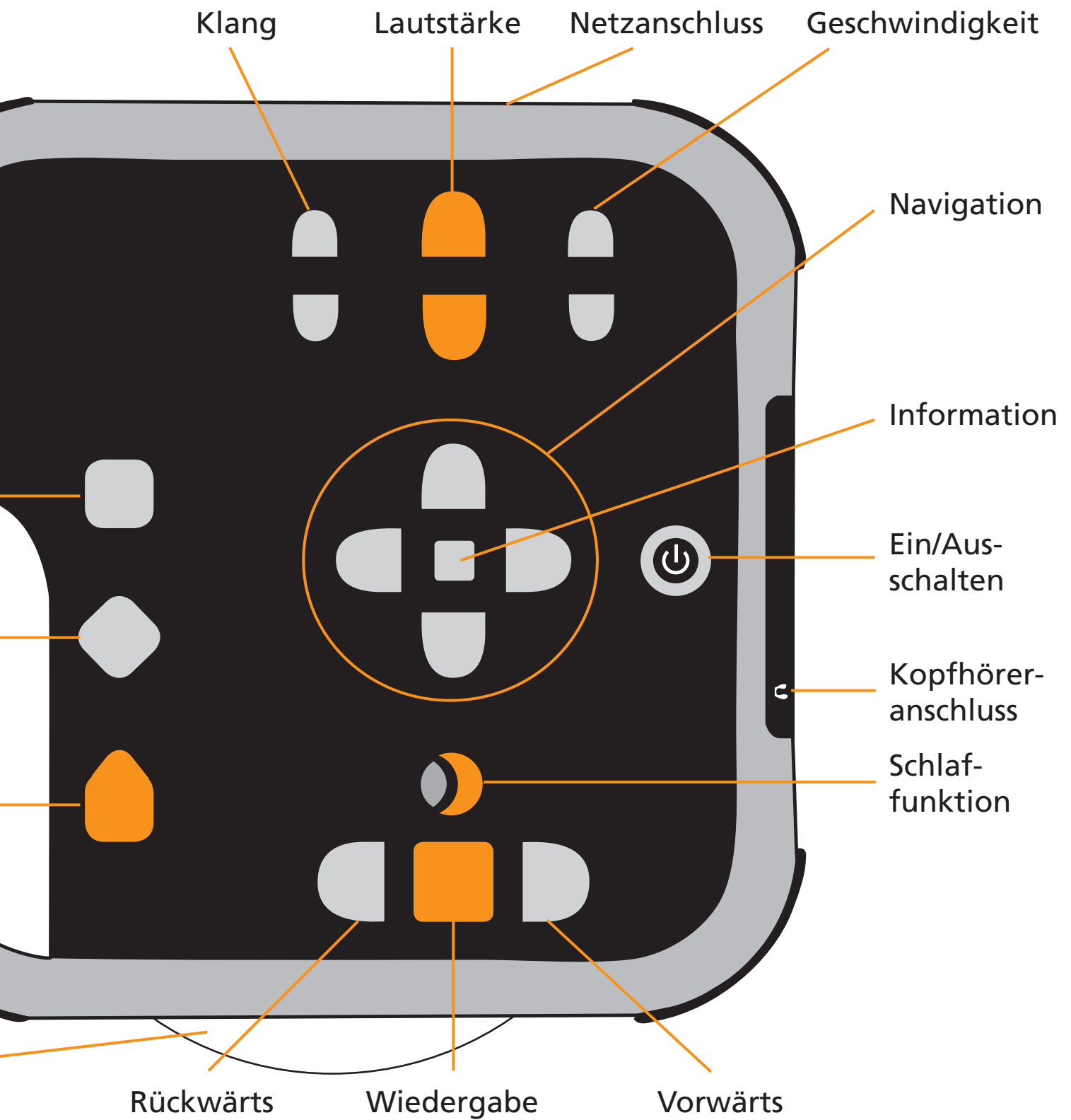

Tastaturhilfe

Die Tastaturhilfe ist automatisch eingeschaltet, wenn keine CD eingelegt ist. Drücken Sie eine Taste und der Victor Reader sagt Ihnen die zugehörige Funktion an.

Funktionen

- **Lesezeichen-Liste:**
Durch einmaliges Drücken der Taste 'Lesezeichen' gelangen Sie in die Lesezeichenliste.
Mit den Pfeiltasten links/rechts springen Sie zu entsprechenden Lesezeichen.
- **Lesezeichen löschen:**
Durch zweimaliges Drücken der Taste 'Lesezeichen' werden alle Lesezeichen gelöscht.

Hinweise

1. Akku:
Einen passenden Ersatzakku können Sie über unseren Service beziehen.
2. Reset:
Durch ca. 10 Sekunden langes Drücken der Taste 'Ein/Ausschalten' setzen Sie das Gerät in den ursprünglichen Zustand zurück.
3. Das Gerät lädt ca. alle drei bis vier Minuten neue Daten von der CD. Die hierdurch entstehenden Geräusche beeinträchtigen nicht die Funktion.
4. CD wird nicht ausgeworfen:
 - Drücken und halten Sie die Taste 'CD-Auswurf'.
 - Starten Sie nach ca. 10 Sekunden das Gerät neu bei weiterhin gedrückter Taste 'CD-Auswurf'.
 - Eventuell handelt es sich um eine zu sehr beanspruchte CD Ihrer Hörbücherei.