

Victor Reader Stratus 12 M

Bedienungsanleitung – Erste Schritte



Victor Reader Stratus 12 M

Lieferumfang

1. Daisyplayer mit CD-Laufwerk, Anschluss für USB und Flash-Karte, Text-zu-Sprache-Funktion
2. Ladegerät
3. Hörbuch auf CD mit Bedienungsanleitung

Inbetriebnahme

1. Vor der ersten Inbetriebnahme schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an. Dazu stecken Sie das Ende des mitgelieferten Netzteils in den Netzanschluss, der sich auf der Rückseite rechts befindet. Während des Ladevorgangs blinkt die Einschalttaste.

Bitte beachten: Der Victor Reader kann während des Ladevorgangs benutzt werden.

2. Schalten Sie den Victor Reader ein indem Sie die Taste 'Ein/Ausschalten' gedrückt halten. Sie hören einen Piepton und einen Begrüßungstext.

3. Schieben Sie die beiliegende CD vorne in den Schlitz des Laufwerks. Die CD enthält eine aufgesprochene Bedienungsanleitung im Daisy-Format. Warten Sie bis der Titel angesagt wird. Drücken Sie dann die Taste ‚Start/Stopp‘ und die Bedienungsanleitung wird vorgelesen.

Navigation

1	Bücherregal
2,4,6,8	Navigation
3	Nicht belegt
5	Wo bin ich?
7	Menü
*	Abbrechen
0	Hilfe/Tastenbeschreibung
#	Bestätigen


Bücherregaltaste

Lesezeichen

CD-Auswurf

CD-Laufwerk



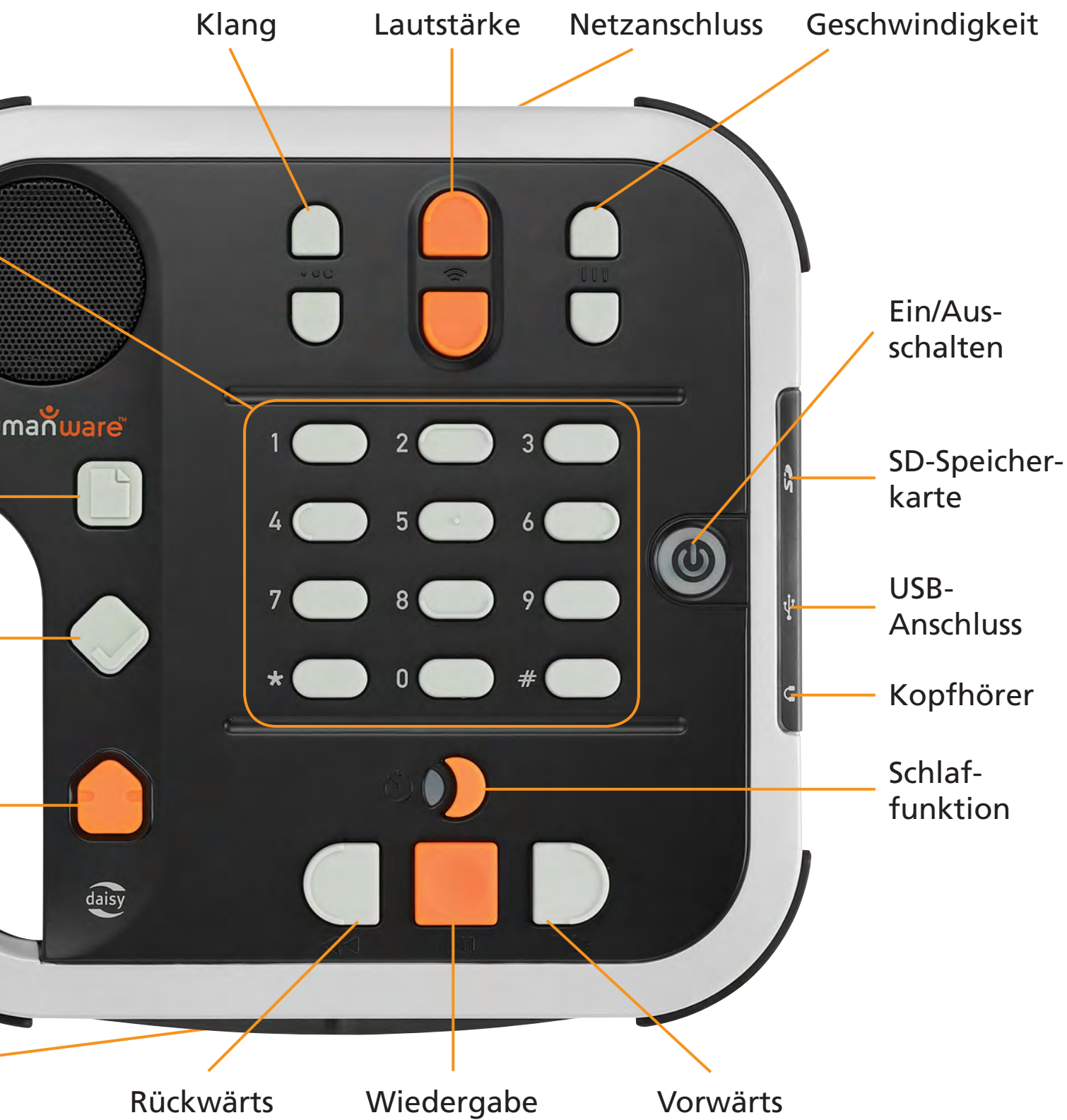

Tastaturhilfe

Durch längeres Drücken und Halten der Taste 0 wird die Tastaturhilfe aufgerufen, d. h. jeder Tastendruck wird angesagt. Dies gilt, wenn eine CD eingelegt ist.

Drückt man die 0 abermals länger, wird die Tastaturhilfe deaktiviert.

Funktionen

- **Lesezeichen einfügen:**
Durch zweimaliges Drücken der Taste ‚Lesezeichen‘ kann ein Lesezeichen eingefügt werden.
- **Lesezeichen anspringen:**
Durch einmaliges Drücken der Taste ‚Lesezeichen‘ wird das gesetzte Lesezeichen angesprungen.
- **Lesezeichen löschen:**
Durch fünfmaliges Drücken der Taste ‚Lesezeichen‘ wird das gesetzte Lesezeichen entfernt.

Hinweise

1. Akku:
Einen passenden Ersatzakku können Sie über unseren Service beziehen.
2. Reset:
Durch ca. 10 Sekunden langes Drücken der Taste ‚Ein/Ausschalten‘ setzen Sie das Gerät in den ursprünglichen Zustand zurück.
3. Das Gerät lädt ca. alle drei bis vier Minuten neue Daten von der CD. Die hierdurch entstehenden Geräusche beeinträchtigen nicht die Funktion.
4. CD wird nicht ausgeworfen:
 - Drücken und halten Sie die Taste ‚CD-Auswurf‘.
 - Starten Sie nach ca. 10 Sekunden das Gerät neu bei weiterhin gedrückter Taste ‚CD-Auswurf‘.
 - Eventuell handelt es sich um eine zu sehr beanspruchte CD Ihrer Hörbücherei.